

## **SERTIFISERING BRAUNPUMPENE: PRAKTISKE OPPGAVER (Perfusor og Infusomat Space)**

1. Slå på pumpa og sett inn sprøyte rett.
2. Sjekk batterikapasiteten på pumpene
3. Finn frem medikamentprotokollen og still inn sprøytepumpa på Noradrenalin til en pasient som veier 78 kg. Start på 0,07 mcg/kg/min.
4. Bytt sprøyte uten å få luft i settet, uten å gi en utilsiktet bolus, samt at prosedyren er aseptisk.
5. Du vil gå utenom medikamentprotokollen og gi Amiodarone vedlikeholdsdose i dobbel-konsentrasjon: 4,8 mg/ml. (1200 mg i totalt 250 ml glucose). Hvordan vil du gjøre dette? Kan du også hente opp medikamentnavnet?
6. Still inn trykkgrensene på pumpene til 6. Hva bør de i utgangspunktet stå på?
7. Still inn en infusjonspumpe med Deksmetomidine 100 ml til en pas. på 67 kg. (kons.: 0,004 mg/ml) Start på 1 mcg/kg/t.
8. Les av gitt volum og medikamentmengde og nullstill pumpene.
9. Du får en devicealarm. Hva gjør du med det?
10. Hvordan ser du at pumpa står til lading?