

MIDLER TIL DAGLIG RENGJØRING OG/ELLER DESINFEKSJON I SSHF BRUK HANSKER

Ecolab Incidin Duo*


Engangs rengjørings og desinfeksjonskluter. Klutene er fuktet med desinfeksjonssprit og rengjøringsmiddel.

Bruksområde:

Eks: nattbord, staseslanger, BT-mansjett, overflater, kontaktpunkter, samt medisinsk utstyr som tåler sprit. Kan brukes til flekkdesinfeksjon.

Virketid: 1 minutt

Holdbarhet etter åpning: 6 mnd.

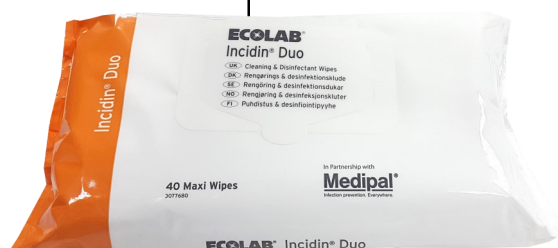

Antibac desinfeksjonskluter*

Kun til desinfeksjon, rengjør ikke. Brukes kun på rene flater. Klutene er fuktet med alkohol.

Bruksområde:

Eks: nattbord, dørhåndtak, lysbrytere og andre overflater og kontaktpunkter som tåler sprit.

Virketid: minst 1 minutt

Holdbarhet etter åpning: 3 mnd.



Saniswiss sanitizer Palliance*

Engangsservietter til rengjøring og desinfeksjon av ikke-invasivt medisinsk utstyr.

Bruksområde:

Eks: nattbord, staseslanger, BT-mansjett, overflater, kontaktpunkter, samt medisinsk utstyr som ikke tåler sprit.

Kan brukes til flekkdesinfeksjon. Virkestoff pereddiksyre og hydrogenperoksid

Virketid: 5 minutter + 15 min på sporer

Holdbarhet etter åpning: 2 mnd



*** BRUKES IKKE TIL SMITTEVASK, MEN KAN BENYTTES TIL DESINFEKSJON AV KONTAKTPUNKTER ETTER KORTVARIG OPPHOLD/UNDERSØKELSE/BEHANDLING.**

MIDLER TIL DAGLIG RENGJØRING OG/ELLER DESINFEKSJON I SSHF

Rely+on Virkon

Oksidativt rengjørings- og desinfeksjonsmiddel til utblanding i vann.

Bruksområde:

Generell desinfeksjon av overflater. Virker ikke på sporer eller tuberkulose.

Virketid: 10 min (forurenset utstyr: 30 min)

Holdbarhet etter utblanding: 5 døgn

Brukt desinfeksjonsmiddel kastes daglig.



Rely+on PeraSafe

Oksidativt rengjørings- og desinfeksjonsmiddel til utblanding i vann.

Bruksområde: Generell desinfeksjon av overflater samt invasivt og ikke-invasivt medisinsk utstyr.

Virksomt også på sporer og tuberkulose

Virketid: 10 min

Holdbarhet etter utblanding: 12 timer eller opptil 20 nedsenkninger, hva som enn inntreffer først.



Tristel Duo ULT—brukes sammen med Duo wipes

Rengjørende og desinfiserende skum.

Bruksområde:

Ultralydprober. Fjern først ev. gel fra proben. Skummet påføres med engangskluten/wipesen. Viktig at alle overflater dekkes, inkludert kabel.

Virketid: minimum 30 sekunder



Wipe Clean universal cleaning

Engangs rengjøringsklut

Klutene er fuktet med rengjøringsmiddel og vann.

Bruksområde:

Eks: nattbord, dørhåndtak, lysbrytere og andre overflater og kontaktpunkter.

Virketid: Ikke aktuelt

Holdbarhet etter åpning: 12 mnd.

