

Reparasjon av endoskop

Side 1 av 1

Dokumentplassering: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-53	Godkjent dato: 30.05.2024	Revideres innen: 30.05.2026	Sist endret: 30.05.2024	Revisjon: 4.00
--	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Retningslinje for hvordan skade på endoskop skal håndteres.

MÅLGRUPPE

Teknikere og sykepleiere på gastrolab.

FREM GANGSMÅTE

Det kan oppstå feil eller skader på skop i form av lekkasje, wire som er røket eller andre ting. Det må da vurderes om skopet skal sendes til reparasjon, og om det kan vaskes og desinfiseres først. Dette gjelder både Olympus skop og Pentax skop.

Dersom det oppdages lekkasje i skopet, skal skopet ikke vaskes, men sendes til reparasjon. Ved andre feil på skopet, kan det vurderes om skopet skal vaskes før det sendes. Alltid lurt å være to som vurderer skaden / feilen. Kontakt leder hvis du er i tvil.

- Hvis skopet ikke er vasket. Legg blå plast i kofferten før skopet legges i. Koffert finnes på låst lager.
- Ventiler og lokk til konnektoren sendes ikke med.
- Skopet registreres i Medusa av avdelingssykepleier eller av Hanne på med. Tek. Når skopet kommer opp.
- Kofferten med skopet leveres til Medisinsk teknisk i 3. etasje. Vår kontakt er for tiden Hanne (3860).
- Skriv i reparasjonsboken på det aktuelle skopet, dato og årsak til at skopet sendes.
- Skriv i folderen på skyllerommet nummeret på skopet som ble sendt og dato.
- Registrer i boka og i folderen når skopet eventuelt kommer tilbake.
- Alle fleksible endoskop må gjennomgå full manuell rengjøring og desinfeksjon før de tas i bruk.

Utarbeidet av: Janicke Lindebø Aamot	Fagansvarlig: Katrine Vårlid Foss	Verifisert av: □	Godkjent av: Janicke Lindebø Aamot	Dok.nr: D46939
--	---	----------------------------	--	--------------------------