


Intensiv seng , Hill-Rom TotalCare

Start alltid med å Nullstille vekt før pasienten flyttes over i senga.

- Legg senga helt flat
- Kjør senga opp i høyeste posisjon
- Nullstill via meny på Display høyre side

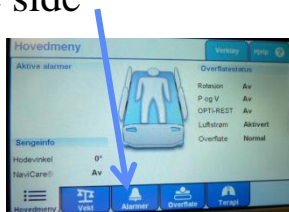

Transport av intensivsenga

- Alle sidegrindene må være oppe
- Ta opp kjørehåndtakene
- Koble bort strømkabelen
- Dersom bremsepedalen står vannrett, er den i nøytral posisjon og sengen kan flyttes i alle retninger
- Dersom bremsepedalen står i styreposisjon, kan man flytte sengen i en rett linje gjennom korridorer.
- Trykk på kjørehåndtakenes innside (en eller begge) for å aktivere drivmekanismen. Bremsepedalen må da stå i styreposisjon.
- Sengeenden må ikke brukes til å styre sengen med under transport.

Hvordan ta ned sidegrindene




Grip
utløserhåndtaket og
dra ut. Sideskinnen
senkes automatisk

Iv-stativ



- Iv-stativet tåler 18 kg.
- Det kan legges ned ved først å løfte det opp av sporet, deretter legges ned langs hodeenden.

Betjeningspanel høyre side

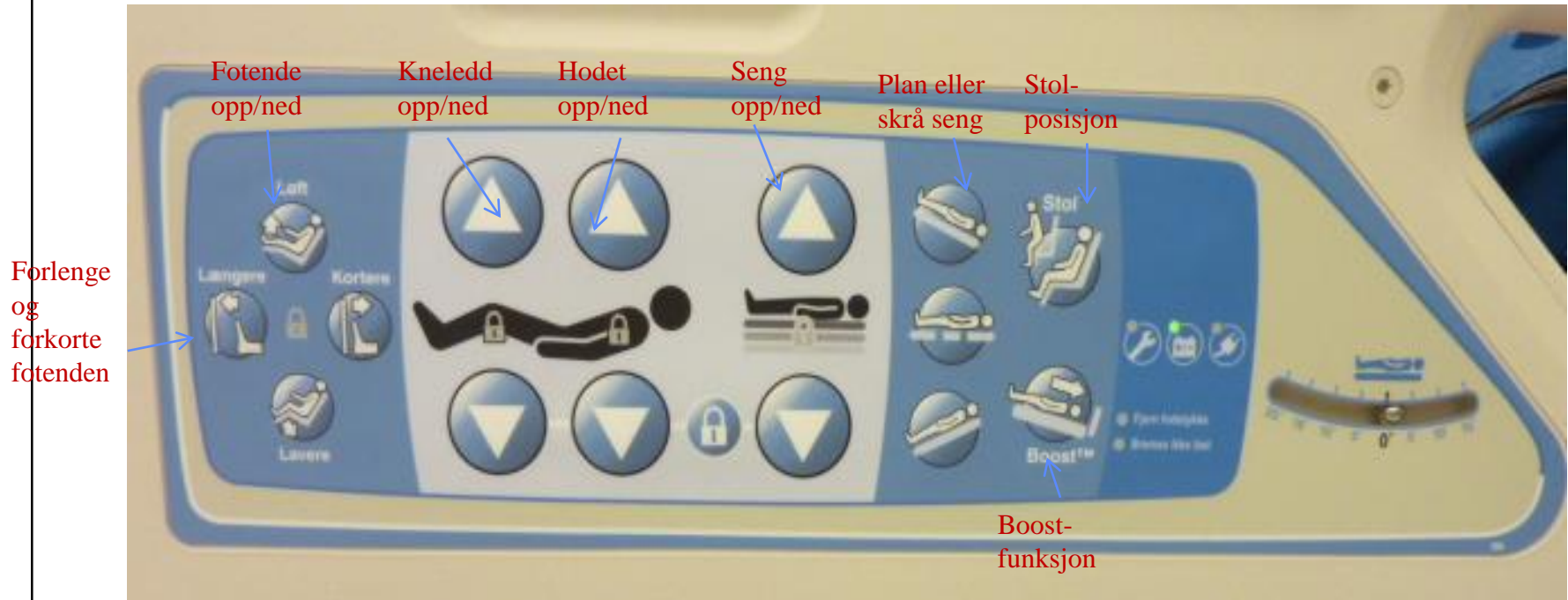

Når man regulerer på hodeenden, reguleres kneleddet samtidig
Boost-funksjonen kan brukes når pasienten skal lenger opp i sengen

To små tips

- Hodeenden kan tas av og benyttes som ryggunderlag ved HLR.
- Sengen kan bli 20 cm kortere ved å snu fotenden på sengen.

Rtg. thorax



Dra ned
glidelåsen på
madrassen og
legg inn
røntgenplata

Hodevinkel



Kula viser hvor mange grader hodeenden er hevet

Trendelenburg og HLR-situasjoner

- For å oppnå Trendelenburgleie løft og hold oppe TREN-pedalen med foten. Når man har oppnådd ønsket posisjon, slipper man pedalen
- Ved en akutt HLR-situasjon, må man trø på pedalen. Da vil hodeenden gå helt ned og sengen flates ut. Det blåses luft inn i madrassen til max oppblåst. Hodeenden kan evt brukes som hjertebrett. Etter 30 min går madrassen tilbake til normal.



Vektfunksjonen

- Trykk på vekt på hovedmenyen
- Nullstill vekten før pasienten legges i sengen
- For å veie pasient i seng, følg instruksene på skjermen




Betjeningspanel venstre side



For å kunne aktivere de ulike funksjonene, trykk på nøkkelen først. Denne vil lyse i 20 sekunder, og i løpet av denne tiden kan man aktivere ønsket funksjon.

Display hovedmeny

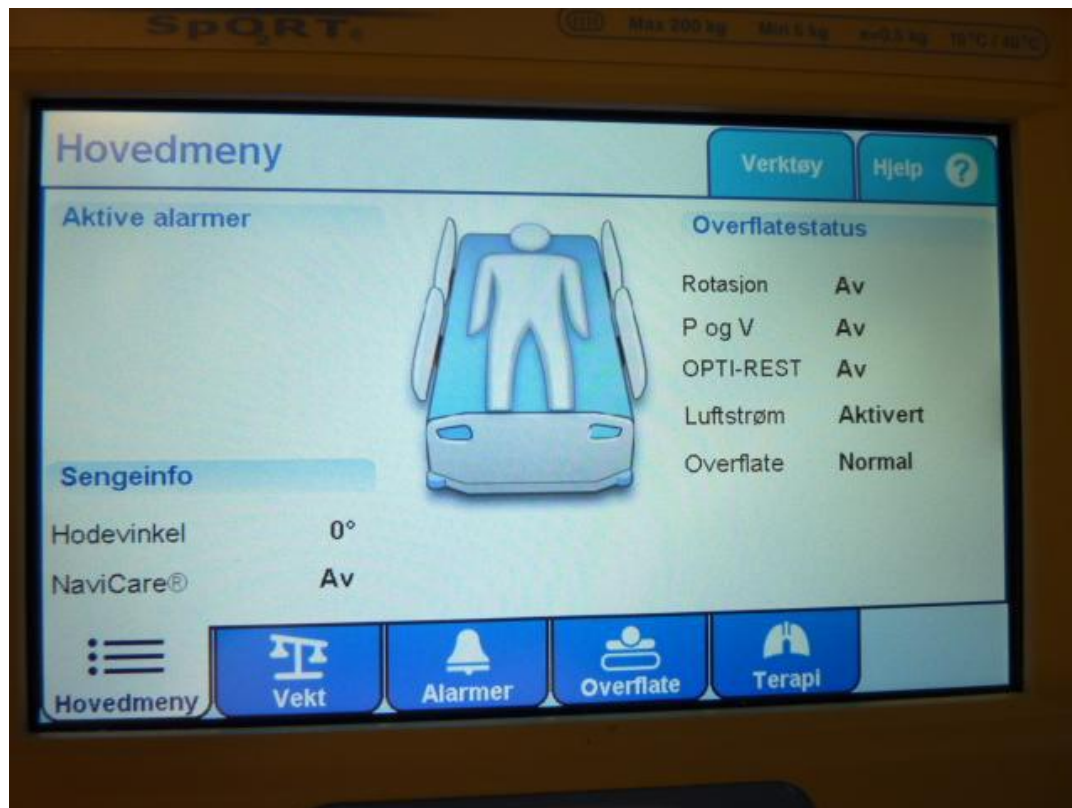

- Velg OPTI-REST, vendeassistanse og maks oppblåsning under **Overflate**
- Velg Rotasjon og Prekusjon/Vibrasjon under **Terapi**

Overflate



- Opti-rest gir øket komfort for pasienten samtidig som trykkavlastning opprettholdes
- Vendehjelp hjelper deg å snu pasienten. Sideskinnen må være oppe.

Vendeassistanse

- Denne brukes for å snu pasienten til høyre eller venstre side.
- **Tips ved stell:** Bruk vendeassistanse for å snu. Når pasienten er kommet over, bruk max oppblåsning for å stille på rygg og sete.
- Max oppblåst funksjonen avbrytes etter 30 minutter.

Terapi

- **Rotasjon:** Programmet roterer pasienten mellom høyre sideleie, ryngleie og venstre sideleie. Velg grader.
- **Perkusjon og vibrasjon:** Program som banker eller vibrerer på øvre del av rygg. Lungesekret mobiliseres og løsner.
- Følg instruksjonene på skjermen.



Rengjøring av sengen etter bruk

- Madrassen kan vaskes for hånd såpevann
- Ved smitte kan madrassen vaskes med Virkon. Perasafe max 1%
- Pass på at det ikke kommer vann inn i modullene i hodeenden.
(behandlingsmoduller –rotasjon, perkusjon og vibrasjon)