

 Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service		Brukerveiledning	
Endring av pasient-ID for Luminos dRF Max E3			Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.6-6	Godkjent dato: 08.01.2025	Gyldig til: 08.01.2027	Dato endret: 08.01.2025
		Revisjon: 1.03	

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 08.01.2027 uten endringer i dokumentet.

HENSIKT

Endring av pasient-ID på modalitet Luminos dRF Max. E3

OMFANG

Gjelder for alle radiografer som jobber på E3 med Luminos dRF Max

BAKGRUNN

Pasient-Id må rettes på modalitet da endring av pasient-ID i PACS ikke endrer Dicomtaggen.


Altså bildene og taggen har ulik pasient-ID

UTFØRELSE

HUSK BILDENE MÅ IKKE SENDES OVER TIL PACS FØR PASIENT-ID ER ENDRET.

Hvis bildene er oversendt PACS. Rett først til riktig pasient-ID på modaliteten. Send bildene så over til PACS. Slett bildene på pasient med feil ID.


- Ha opp skjermbilde med Examined Patients
- Velg pasient som skal endres fra lista.

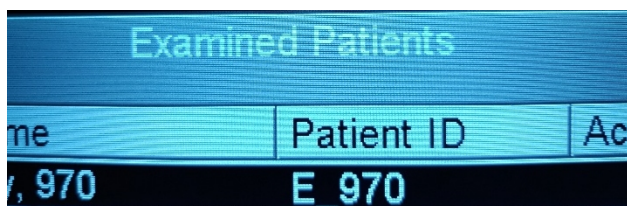

- Trykk på bilde med blyant.



- Nytt skjermbilde kommer opp.
- Skriv inn Pasientnavn og ID i rubrikkene som kommer opp.
- Skriv også inn Accession.No (NORSSA)
- Trykk OK
- Send over bildene.

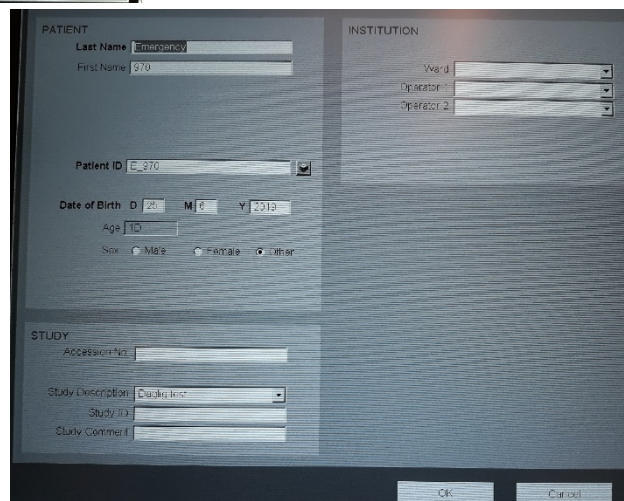

DokumentID:D47395

Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Vigdis Rasmussen	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Verifisert av: [Signature]
---	--	---	--------------------------------------

 SØRLANDET SYKEHUS	Endring av pasient-ID for Luminos dRF Max E3				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.6-6	Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Vigdis Rasmussen	Godkjent dato: 08.01.2025	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 1.03

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

Link: [Brukermanual Luminos dRF Max engelsk versjon i Merida web.](#)

Papirversjon av brukermanual (norsk) i hylla i operatørrommet.

Vedlegg:

Kryssreferanser:

Eksterne referanser: