		<b>Medisinsk serviceklinikk</b>			<b>Brukerveiledning</b>	
<b>Endring av pasient-ID for Luminos dRF Max E3</b>					Side 1 av 2	
Dokumentplassering: <b>II.MSK.Rad SSA.9.1.6-7</b>		Godkjent dato: <b>06.10.2022</b>	Gyldig til: <b>06.10.2024</b>	Dato endret: <b>06.10.2022</b>	Revisjon: <b>1.02</b>	

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Opplæring / teknisk støtte/Opplæring / Bruksanv./Opplæring / Bruksanv. E3  
 DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 06.10.2024 uten endringer i dokumentet.

## HENSIKT

Endring av pasient-ID på modalitet Luminos dRF Max. E3

## OMFANG

Gjelder for alle radiografer som jobber på E3 med Luminos dRF Max

## BAKGRUNN

Pasient-Id må rettes på modalitet da endring av pasient-ID i PACS ikke endrer Dicomtaggen. Altså bildene og taggen har ulik pasient-ID

## UTFØRELSE

**HUSK BILDENE MÅ IKKE SENDES OVER TIL PACS FØR PASIENT-ID ER ENDRET.**

Hvis bildene er oversendt PACS. Rett først til riktig pasient-ID på modaliteten. Send bildene så over til PACS. Slett bildene på pasient med feil ID.


- Ha opp skjermbilde med Examined Patients
- Velg pasient som skal endres fra lista.




- Trykk på bilde med blyant.




- Nytt skjermbilde kommer opp.
- Skriv inn Pasientnavn og ID i rubrikkene som kommer opp.
- Skriv også inn Accession.No (NORSSA)
- Trykk OK
- Send over bildene.

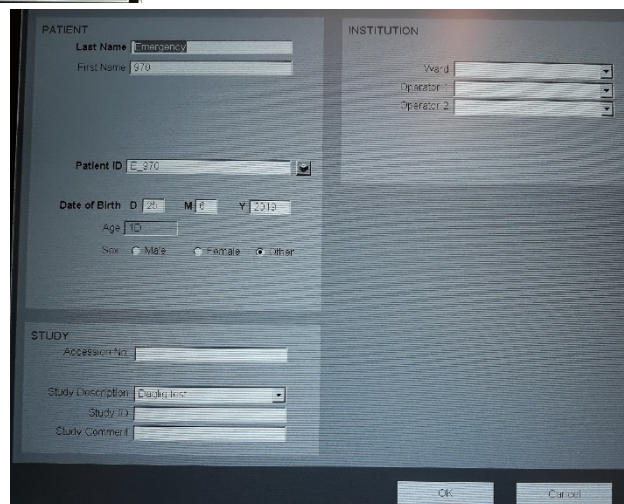

DokumentID:D47395

Utarbeidet av: <b>Vigdis Rasmussen</b>	Fagansvarlig: <b>Vigdis Rasmussen</b>	Godkjent av: <b>Avd. leder Inger Wenche Nilsen</b>	Verifisert av: 
---	--	---	---

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Endring av pasient-ID for Luminos dRF Max E3</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSA.9.1.6-7	Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Vigdis Rasmussen	Godkjent dato: 06.10.2022	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 1.02

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Opplæring / teknisk støtte/Opplæring / Bruksanv./Opplæring / Bruksanv. E3

Link: [Brukermanual Luminos dRF Max engelsk versjon i Merida web.](#)

Papirversjon av brukermanual (norsk) i hylla i operatørrommet.

**Vedlegg:**

**Kryssreferanser:**

**Eksterne referanser:**