

Ultralyd apparat GE Logic E9 - forenklet brukerveiledning, Radiologisk avdeling SSF

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.MSK.Rad SSF.2.E-1

Godkjent dato:

04.11.2022

Gyldig til:

04.11.2024

Dato endret:

04.11.2022

Revisjon:

1.01

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSF/Pasienter og brukere/Ultralyd

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Papirversjon v. apparatet

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Ingen endring

Forlenget gyldighet til 04.11.2024

HENSIKT

Kortfattet oversiktlig utdrag av brukerveiledning tilpasset de oppgaver målgruppen skal utføre.

OMFANG

Gjelder for alle radiografer som klargjør pasienter for UL-undersøkelse

UTFØRELSE



Strømbryter er bak på maskinen. **PÅ/AV knapp** er framme på tastaturet. Strømbryter skal alltid stå på. Dersom maskinen har hengt seg opp kan man slå helt av og slå av/på strømbryter og forsøke på nytt.



DokumentID:D47660

Utarbeidet av:
Solfrid Hamre

Fagansvarlig:
Solfrid Hamre

Godkjent av:
Klinikkdirektør Siri Tønnessen

Verifisert av:
□

 SØRLANDET SYKEHUS	Ultralyd apparat GE Logic E9 - forenklet brukerveiledning, Radiologisk avdeling SSF				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSF.2.E-1	Utarbeidet av: Solfrid Hamre	Fagansvarlig: Solfrid Hamre	Godkjent dato: 04.11.2022	Godkjent av: Klinikkdirektør Siri Tønnessen	Revisjon: 1.01

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSF/Pasienter og brukere/Ultralyd

SLÅ PÅ: Trykk PÅ knapp, apparatet bruker noen min å kjøre seg opp. Trykk på touchskjerm, login vindu kommer opp. USR er default bruker (ADM er for MTA), **passord står på innsiden av borterste skap til høyre for vasken.** For å flytte musepeker, rull på kula. For å bekrefte med ENTER, trykk på kvadranten til høyre for kula ("kvart over")

SLÅ AV: Trykk PÅ knapp, vindu med flere valg kommer opp. Velg LUKK, apparatet slår seg av.

HENT OPP PASIENT: Trykk på ARBEIDSLISTE i pasientvindu(undersøkelsesskjermen), sett musepeker på riktig pasient og dobbeltklikk med ENTER.

ANONYMISERE SKJERMEN: Trykk på PASIENT og deretter DATAOVERFØRING

SENDE BILDER PÅ NYTT: Hent opp aktuell pasient, dobbeltklikk slik at bildene kommer opp i pasientvindu. Trykk DATAOVERFØRING.

MANUELL REGISTRERING:

- Sett musepeker på PASIENT, ENTER
- Skriv inn pas id, dd.mm.åååå
- Last name, first name
- Musepeker på REGISTRER, ENTER

SENDE BILDER UTEN ID: Hent opp bildene (kan finnes i AKTIVE BILDER), trykk DATAOVERFØRING, feilmelding kommer opp, velg AUTOGENERER

Kryssreferanser:

Eksterne referanser: Brukermanual GE Logiq E9