

		Klinikknivå			Generelt dokument
Endoskopi - utstyr og generell oppdekking					Side 1 av 3
Dokumentplassering: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-57		Godkjent dato: 23.10.2024	Revideres innen: 23.10.2026	Sist endret: 23.10.2024	Revisjon: 4.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Endoskopi – utstyr og generell oppdekking

Rom 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 er utstyrt med:

Instrumentrack som inneholder:

- Lyskilde m/vannflaske
- Videoprosessor
- Diatermiapparat, nøytralplate til pasient med tilhørende ledninger. (Ikke rom 4)
- Co2 gass på instrumentrack.
- Vannspyler (ikke rom 4)

Rom 4

- Har i tillegg et eget utstyr med Pentax lyskilde og skjerm til EUS på samme rack.

Endoskop

- Rom 1,2,3,5, og 6 har 190 rack , og alle skop passer til dette.
- Rom 4 har 180 rack , og må ha 180 skop.
- Rom 5 har også et 180 rack som kan transporteres rundt ved behov.
- Rom 7 har et 1500- Rack. Det har i tillegg et kolonskop (358) som bare passer til dette racket.
- Tørkeskap til endoskop står på rom 2 og 6. I kontrollpanelet kan du se hvor lenge skopet har hengt.
- På benken under vinduene finnes ventiler til skopene, Resten av tilhørende utstyr (biopsitenger, slynger og annet utstyr) er plassert i trå skuffer under benken. På rom 6 og 7 er utstyret i skuffene under arbeidsbordet. Ventiler til EUS-skopet er i skapet på rom 4.
- Rengjøringsbørster og annet utstyr til rengjøring er på skyllerommet.

Skopguide

Vi har 5 skopguider. De er stasjonære, men kan flyttes på ved behov av Hanne på med. Tek.

Sug, sugokolbe og O2 tilkobling

- Er standard på alle rom

Assistansebord med standard innhold

- Skumkluter
- Hansker, usterile (hulle på veggen)
- Plastforklær (hulle på veggen)
- Eksplorasjonskrem
- Biopsiglass med 4% Formalin
- Antibac våtservietter
- Vaskeservietter med desinfeksjon. Merke varierer med anbud.
- Polyppkopp med pinsett
- Gul boks til brukte kanyler
- Cellestoff og pussbekken

Utarbeidet av: Katrine Vårlid Foss	Fagansvarlig: Katrine Vårlid Foss	Verifisert av: <input type="checkbox"/>	Godkjent av: Janicke Lindebø Aamot	Dok.nr: D47763
--	---	--	--	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU		Endoskopi - utstyr og generell oppdekking			Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-57	Utarbeidet av: Katrine Vårlid Foss	Fagansvarlig: Katrine Vårlid Foss	Godkjent dato: 23.10.2024	Godkjent av: Janicke Lindebø Aamot	Revisjon: 4.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere

Oppdekking til skopi

- Bordet dekkes med papirlaken
- Endoskop med tilhørende ventiler og rengjøringsventil
- Hansker til lege/sykepleier
- Plastforkle til lege/sykepleier
- Munnbind og beskyttelsesbriller (ved behov)
- Kompresser
- Skumklut
- En kopp vann m/noen dråper minifom, 60ml sprøyte til skylling
- Sugelang
- Eksplorasjonskrem
- En kopp (kaldt) vann 4 dl og 2 ml enzymsåpe. Enzymsåpe står oppblandet i 10 ml sprøyter på vaskene
- Evt. ekstra spyleslange

Tilleggsutstyr v/gastroskopi

- Xylocain spray 10mg/dosis
- Munnstykke
- Biopsitang
Helicobacterprøve

Tilleggsutstyr ved koloskopi

- Biopsitang/Polyppslynge
- Vannspyler med fotpedal
- Blått (ferdig blandet fargestoff) til å løfte eventuelle polypper
- Injeksjons nål for å kunne injisere blåfarge

Framgangsmåte

- Ventilene settes i skopet
- Skopet koples til lyskilden
- Fyll flasken med vann og kople til skopet (ved bruk av Co2 gass brukes eget lokk til flasken)
- Sett på sugelangen
- Test at skopet suger, spyler vann og blåser luft (evt. Co2). Påse at du har bilde og hvitballansør lyset. (Må gjøres en gang for hvert nytt skop på alle rack) Sjekk at lyset blender ned når du holder skopet nær kompressen.
- Vippeleddet smøres med litt eksplorasjonskrem før bruk

Rengjøring av endoskop

- Se egen prosedyre

Rengjøring av assistansebordet

- Ved ikke synlig søl: Vask toppen, kontaktpunkt på raket og suget med engangs desinfeksjons klut.
- Ved synlig søl: Tørkes sølet bort, og det vaskes med Ecolab Incidin clean engangs våtseviert. Bruk Virkon ved søl av kroppsvæsker.

Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-57	Utarbeidet av: Katrine Vårlid Foss	Fagansvarlig: Katrine Vårlid Foss	Godkjent dato: 23.10.2024	Godkjent av: Janicke Lindebø Aamot	Revisjon: 4.00
--	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere