		Klinikknivå			Prosedyre
Optomap					Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.SOA.ØYE.2.8.2-17		Godkjent dato: 02.06.2023	Revideres innen: 02.06.2025	Sist endret: 02.06.2023	Revisjon: 3.00

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

California Optos brukes for å ta netthinnebilder som kan bidra til diagnose og overvåking av sykdommer og endringer som opptrer på netthinnen.

FORBEREDELSE

Rengjør områdene der pasienten kommer i kontakt med enheten.

Skriv inn pasientopplysninger, fullt navn og personnummer, eller søk etter pasient som allerede er registrert på enheten.

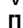
Informere pasienten.

FREM GANGSMÅTE

- Stå på siden av pasienten slik at du kan nå berøringsskjermen, bordets høydebryter, og samtidig kan følge med på plasseringen av pasientens ansikt.
 - Juster bordet eller setet slik at pasientens øyne er i linje med øyevinkel-markeringen.
 - Be pasienten følge fikseringslyset når de flytter seg nærmere enheten.
 - Deretter dreie hode lett, slik at nesen er på utsiden av ansiktsputen. Kontroller at pasientens hode er vertikalt og at det ikke har blitt vridd.
 - Sjekk at pasientens hode er støttet av hodestøtten, at tennene er sammen og munnen lukket.
 - Juster hakestøtتهøyden for å støtte pasientens hake.
- A. Ved diabetes netthinnefotografering tas to fargebilder (rød/grønn) og et autofluorescens (AF) bilde av hvert øye.
- B. Ved optomap fluoresceinangiografi velges angiografi, det tas fortløpende bilder de to første minuttene etter kontrast er satt, deretter et bilde av hvert øye hvert andre minutt frem til det har gått ti minutter fra start. Se også egen prosedyre «fluoresceinangiografi».
- C. Ved andre typer netthinnebilder (nevus, netthinnerift, amotio, ROP osv) tas type bilde/antall bilder som ønsket av den som bestiller.
- Be pasienten ha begge øyne åpne, se etter midten av det blå fikseringslyset.
 - Finjuster til korrekt posisjon. Hvis lyset er rødt, er skannerhodet for nært, hvis det er blått er det for langt i fra.
 - Ta bilde når lyset er grønt (pasienten vil se dette og det vises også på skjermen).
 - Sjekk kvaliteten på bilde som er tatt og, hvis nødvendig, fortsett å ta bilder.

For utfyllende opplysninger se: California optos USER GUIDE

(finnes i papirutgave på fotorommet)

Utarbeidet av: Ann Karin Bjurstrøm	Fagansvarlig: Espen Ringvold	Verifisert av: 	Godkjent av: Espen Ringvold	Dok.nr: D48149
--	--	---	---------------------------------------	--------------------------