
		INTENSIV		Retningslinje
TRANSPORTVENTILATOR - KRAV TIL BRUKERE AV MASKINEN				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOA.AIO.SSA.7-13	Gruppe: 	Godkjent dato: 16.06.2023	Gyldig til: 16.06.2025	Revisjon: 1.06

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/INTENSIV/Administrative rutiner

HENSIKT

Retningslinje som skal beskrive brukerkrav for opplæring i transportventilator for sykepleiere. Beskrive forventet kunnskap hos bruker av transportventilatoren.

ANSVAR

Enhetsleder har et overordnet ansvar for gjennomføring av brukeropplæring av medisinsk teknisk utstyr (MTU). Ansatte som benytter MTU har et eget ansvar for å kjenne til hvordan utstyret benyttes. Anestesilege har det overordnede ansvaret for behandlingen.

FREMANGSMÅTE

Retningslinjen benyttes ved brukeropplæring og kompetansesikring av transportventilator. Mestringsgrad dokumenteres i GAT etter gjennomført og bestått e-læringskurs og praktisk kompetansesikring.

Å beherske bruk av transportventilator innebærer:

At bruker kjenner til:

- Hvor apparat og ekstra slangesett oppbevares
- Normalverdier for volum og trykk
- Normalverdier for blodgass
- Prosedyrer som omfatter transport av pasient med respiratorbehov, [Intrahospital transport](#)

At bruker kan og mestrer:

- Montere slangesett riktig
- For Hamilton T1/MR1: Utføre preop kontroll
- Lese av innstilte og avleste verdier
- Kan stille inn tilsvarende verdier som for respirator
- Sette apparatet i maskeventilasjon
- Kvittere ut alarm
- Sette fra seg apparatet klart til bruk, rengjort og testet
se: [Hamilton MR1 - rutiner for bruk](#)

[Hamilton T1 - kontrollskjema for klargjøring](#)

At bruker kan forklare:


- Volumkontrollert modus
- Trykkkontrollert modus
- Innstillinger
- Avleste verdier

GENERELT

Kompetansesikringen gjennomføres hvert år

- Teoretisk, via læringsportalen med kurs og kunnskapstest
- Praktisk, med oppgaver som skal løses en-til-en

Teknisk gruppe deltar i både opplæring og kompetansesikring.

Utarbeidet av: H. Hembre	Først utgitt: 28.03.2019	Fagansvarlig: Bjørn Emanuelsen	Godkjent av: Tone Kristin Hansen	
------------------------------------	------------------------------------	--	--	---