

		Somatikk Kristiansand		Retningslinje	
Rengjøring av ergoterapiutstyr/-lokaler ved ESR, AFR					
Dokument ID: II.SOK.AFR.1.3-4		Godkjent dato: 25.08.2021	Gyldig til: 25.08.2023	Side 1 av 2 Revisjon: 1.01	

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Organisasjon, ledelse og administrasjon/Hygiene og smittevern

Hensikt

Sikre god hygiene og hindre smitteoverføring mellom pasient, helsepersonell, utstyr osv.


Gjelder for


Ergoterapeutene ved Enhet for Spesialisert rehabilitering og annet helsepersonell som bruker rommene på ergoterapien og utstyret i tilknytning til ergoterapien.

Handling

Se tabell neste side.

Tabellen skal skrives ut og henge på et egnet og synlig sted i det aktuelle lokalet.

Utarbeidet av: Charine Svendsen Eide	Fagansvarlig: 	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	
--	--	--	--

		Rengjøring av ergoterapiutstyr/-lokaler ved ESR, AFR			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.AFR.1.3-4	Utarbeidet av: Charine Svendsen Eide	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 25.08.2021	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	Revisjon: 1.01

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Organisasjon, ledelse og administrasjon/Hygiene og smittevern

Viktig!

God håndhygiene! Pasientene skal sprite hendene inn til og ut fra rommene!

Type utstyr	Rengjøringsmiddel	Når/hvordan
Behandlingsbenk/pute	IncidinDuo (Virkon ved søl*)	Etter bruk
Kjøkkenutstyr elektrisk	IncidinDuo	Etter bruk
Kjøkkenredskaper	Oppvaskmaskin	Etter bruk
Stoler	IncidinDuo	Etter bruk
Ståbord	IncidinDuo	Etter bruk
Bord, benk, skap	IncidinDuo	Etter bruk
Håndtreningsbord	IncidinDuo	Etter bruk
Verktøy	IncidinDuo	Etter bruk
Div. utstyr (baller, ringer osv.)	Ett av følgende alternativer: 1. Instrumentvaskemaskin 2. Virkon 3. IncidinDuo	Etter bruk
Sitteputer	IndicinDuo ved utprøving. Egne prosedyrer for rengjøring etter bruk.	Etter utprøving Etter bruk
Rullestoler	IndicinDuo ved utprøving. Egne prosedyrer for rengjøring etter bruk.	Etter utprøving Etter bruk
Småhjelpemidler	IndicinDuo	Etter ferdig utlån/utprøving
Tastatur	Antibac - overflatebehandling	En gang i uken

* Ved søl utføres flekkdesinfeksjon som beskrevet i:

[Desinfeksjon/ smittevask ved opphør av isolering og flekkdesinfeksjon](#)