

		Klinikknivå			Retningslinje
Kuvøsevask, rutiner BUA, Nyfødtintensiv					Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.SOK.BUA.1.8-3		Godkjent dato: 09.09.2024	Revideres innen: 09.09.2026	Sist endret: 09.09.2024	Revisjon: 1.04

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Barne- og ungdomsavdelingen/Organisasjon, ledelse og administrasjon-Kristiansand/Hygiene og smittevern
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Klargjøre arbeidsoppgaver og ansvar vedrørende vask av kuvøser på Nyfødtintensiv.

MÅLGRUPPE

Sykepleiere på Nyfødtintensiv og sengevaskpersonalet ved husøkonomen.

FREM GANGSMÅTE

- Sykepleier ved NFI kjører inn skitten kuvøse/seng på sengevask på Barsel.
- Ved smitte må kuvøsen settes inn med Virkon før den kjøres inn på kuvøsevask.
- Vask av kuvøse utføres av husøkonomenheten
- Sengevaskpersonale hos husøkonom melder til koordinator på 3018 når en kuvøse er satt inn på sengevasken til vask.
- Når NFI setter inn en CALEO settes den på vaskemodus av NFI slik at den er klar når husøkonomenheten kommer for å vaske kuvøsen. Det må settes på en lapp hvor det står skrevet at vaskemodus er satt i gang slik at husøkonomenheten vet at vaskeprogram er kjørt.
- Før start sprites alle benkeoverflater med 70% sprit og microfiberklut eller med engangs Incidin Duo kluter.
- Håndklær kan brukes på benker der ting legges til tørk.
- Ved demontering må en være forsiktig med temperatur sensor slik at den ikke blir slått/dunket i stykker.
- Elektronisk utstyr og vektene skal ikke i vann, men tørkes over med microfiberklut.
- Alle deler skal demonteres fra kuvøsen slik at ventil under også kan bli rengjort.
- Små løse gummidelere og vannbeholder skal kjøres i Dekontaminator på program **P3**. Bruk maskin på skyllerom Barsel.
- Hele kuvøsen skal vaskes med vann/såpe og microfiberklut. (med ph nøytral kjemi, her må vi se på dosering)
Vask fra rent mot urent. Husk også understell med hjul.
- Det skal ikke brukes desinfeksjons kluter på kuvøsene, heller ikke 70% sprit. Pleksiglass tåler ikke sprit
- Filter i kuvøsene skal byttes ved hver 3. måned. Når nytt filter settes inn i maskinen, skriv **NY .././.** dato på selve filteret.
- Nye filter ligger på rent lager på NFI. Gi beskjed til fagutviklingssykepleier tlf 8642 før det er tomt på lager.
- Alle deler skal være helt tørre før kuvøsen settes sammen igjen.
- Ren kuvøse kles med blå plast og kjøres inn på NFI.
- Gi beskjed til koordinator på tlf 6265 ved levering.
- Avdelingen rer kuvøse selv.

Kryssreferanser

Utarbeidet av: Linda N. Nesse, Hilde Nymann	Fagansvarlig: Anita Torland Kivle	Verifisert av:	Godkjent av: Anita Torland Kivle	Dok.nr: D49851
---	---	----------------	--	--------------------------

Dokument-id: II.SOK.BUA.1.8-3	Utarbeidet av: Linda N. Nesse, Hilde Nymann	Fagansvarlig: Anita Torland Kivle	Godkjent dato: 09.09.2024	Godkjent av: Anita Torland Kivle	Revisjon: 1.04
----------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Barne- og ungdomsavdelingen/Organisasjon, ledelse og administrasjon-Kristiansand/Hygiene og smittevern

Eksterne referanser