

Aerogen Ultra forstøverbehandling, SSHF

Dokumentplassering:

1.4.16-9

Godkjent dato:

26.06.2024

Revideres innen:

26.06.2026

Sist endret:

26.06.2024

Revisjon:

2.01

Foretaksnivå\Fagspesifikke prosedyrer\Lungesykdommer

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 26.06.2026

Omfang

Prosedyren gjelder helsepersonell som administrerer Aerogen Ultra forstøver. Førstevalg ved inhalasjonsmedisin er inhalasjonsspray og kammer.

Oppkobling og bruk.

Forstøverkolbe (Aerogen Solo og Aerogen Ultra) skal følge pasienten gjennom sykehusoppholdet. Akuttmottak, Intensiv, MIE og 1D ved SSK har utstyr til å bruke denne forstøveren.

Oppkobling



1 Plasser Aerogen solo på Aerogen Ultra adapteren.



2 Fyll på ordinert inhalasjonsvæske. Maks 5 ml.



3 Sett i strømkabel, og evt. O2 tilførsel på undersiden.



4 Trykk på blå knapp 1 sek = 30min forstøving. Hold inne i 3 sek=kontinuerlig forstøving.



* Please note: the 'Aerogen Solo Adapter' name will be replaced with 'Aerogen Ultra'.

Utarbeidet av:
Fagspl. lunge 1D SSK Kurt
Hatløy

Fagansvarlig:
Seksjonsoverlege Guri
Hoven


Verifisert av:

Godkjent av:
For fagdirektør,
overlege Per Kristian
Hyldmo

Dok.nr:
D51073

		Aerogen Ultra forstøverbhandling, SSHF			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.4.16-9	Utarbeidet av: Fagspl. lunge 1D SSK Kurt Hatløy	Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Guri Hoven	Godkjent dato: 26.06.2024	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 2.01

Foretaksnivå\Fagspesifikke prosedyrer\Lungesykdommer

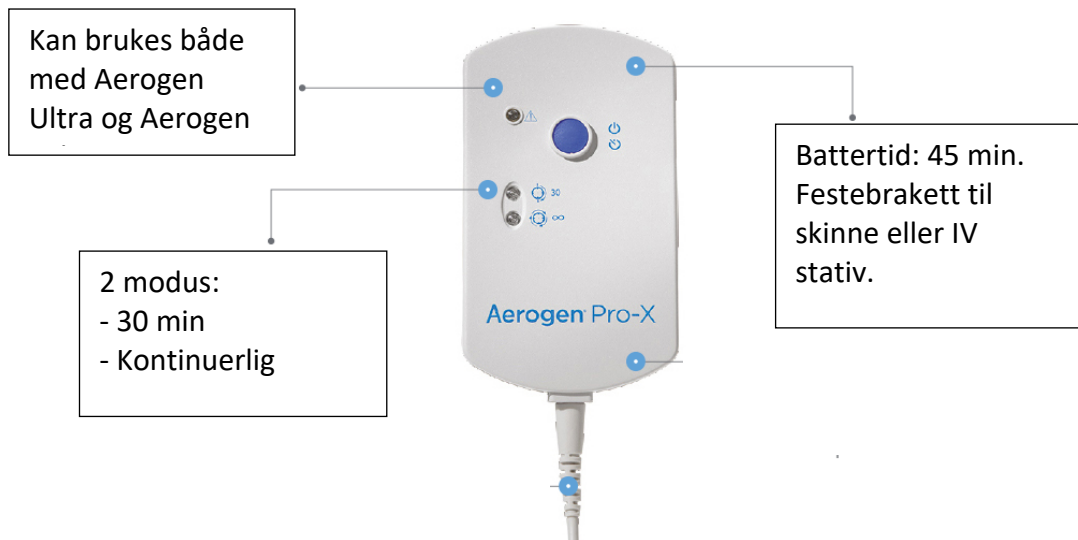

Ytelse Aerogen Ultra

- Utstyret kan alternativt brukes med en ansiktsmaske som medfølger.
- Ved bruk av medfølgende åpen ansiktsmaske må det alltid brukes ekstra oksygenstrømning på 0,5-6 liter per minutt. O2 tilkobling i underkant av Ultra-beger. Minimum 0,5 liter.

Rengjøring/ bytte av utstyr

- Aerogen Pro - X (enheten som man skrur av og på forstøveren) + kabel rengjøres med anbefalt rengjøringsmiddel eller sprites av daglig.
- Aerogen Ultra begeret er en-pasient-bruk og følger pasienten til avdeling med mulighet til å gi denne behandlingen - er holdbart i 5-7 dager. Skylls etter hvert bruk med sterilt vann.
- Aerogen Solo rengjøres ved å tilsette 2 ml NaCl 0,9 % etter forstøving av legemiddel. Ved å forstøve 2 ml NaCl 0,9 % blir metallplaten renses og forhindrer tetting av små hull i metallplaten som tillater forstøving. En-pasients- bruk- holdbart i 28 dager.