

## Redigere eller legge til pasientinformasjon på Discovery XR656 GE - A3

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.MSK.Rad SSA.9.1.8-7

Godkjent dato:

06.10.2022

Gyldig til:

06.10.2024

Dato endret:

06.10.2022

Revisjon:

1.02

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Opplæring / teknisk støtte/Opplæring / Bruksanv./Opplæring / Bruksanv. A3

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.


ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 06.10.2024 uten endringer i dokumentet.

### OMFANG

Gjelder på A3 - Discovery XR656 for radiografer. Gjelder hvis radiografen må endre ID f. eks ved unormal ID (stjernerpasienter).

### UTFØRELSE

1. Ha pasient arbeidsliste åpen  
Se kap. 5 Hurtigtrinn i bruksanvisningen.

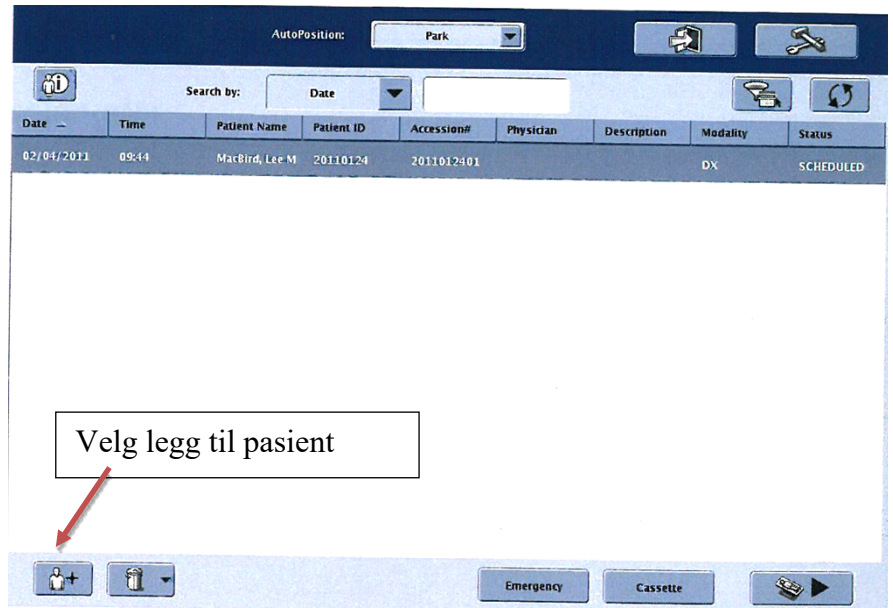

2. Nytt skjermbilde kommer opp, Add Patient  
Skriv inn navn og pasient-ID, riktig ID (uten stjerne). Skriv også inn Accesionnummer. Bildene vil da komme over i PACS på riktig måte. Trykk Start Exam.

<b>Patient</b>		Patient ID:	
First Name:	<input type="text"/>	Birth Date (mm/dd/yyyy):	<input type="text"/>
Middle Name:	<input type="text"/>	Birth Time (HH:MM 24hr):	<input type="text"/>
Last Name:	<input type="text"/>	Age:	<input type="text"/> Years
Gender:	<input type="text"/> Other		
<b>Exam</b>		Status:	
Accession#:	<input type="text"/>	SCHEDULED	
Operator:	<input type="text"/>	Study Description:	
Performing Physician:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referring Physician:	<input type="text"/>	Modality:	
Exam Date (mm/dd/yyyy):	02/24/2011	DX	
Study ID:	<input type="text"/>	Scheduled Exam Time (hh:mm)	
		22:12	
		Procedure Description:	
		<input type="text"/>	
Start Exam		Save	Cancel


DokumentID:D51104

Utarbeidet av:  
**Vigdis Rasmussen**

Fagansvarlig:  
**Vigdis Rasmussen**


Godkjent av:  
**Avd. leder Inger Wenche Nilsen**

Verifisert av:  
□

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Redigere eller legge til pasientinformasjon på Discovery XR656 GE - A3</b>				<b>Side: 2 Av: 2</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSA.9.1.8-7	Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Vigdis Rasmussen	Godkjent dato: 06.10.2022	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 1.02

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Opplæring / teknisk støtte/Opplæring / Bruksanv./Opplæring / Bruksanv. A3

3. Nytt skjermbilde, Select Protocols  
Velg ønsket undersøkelse og aksepter.

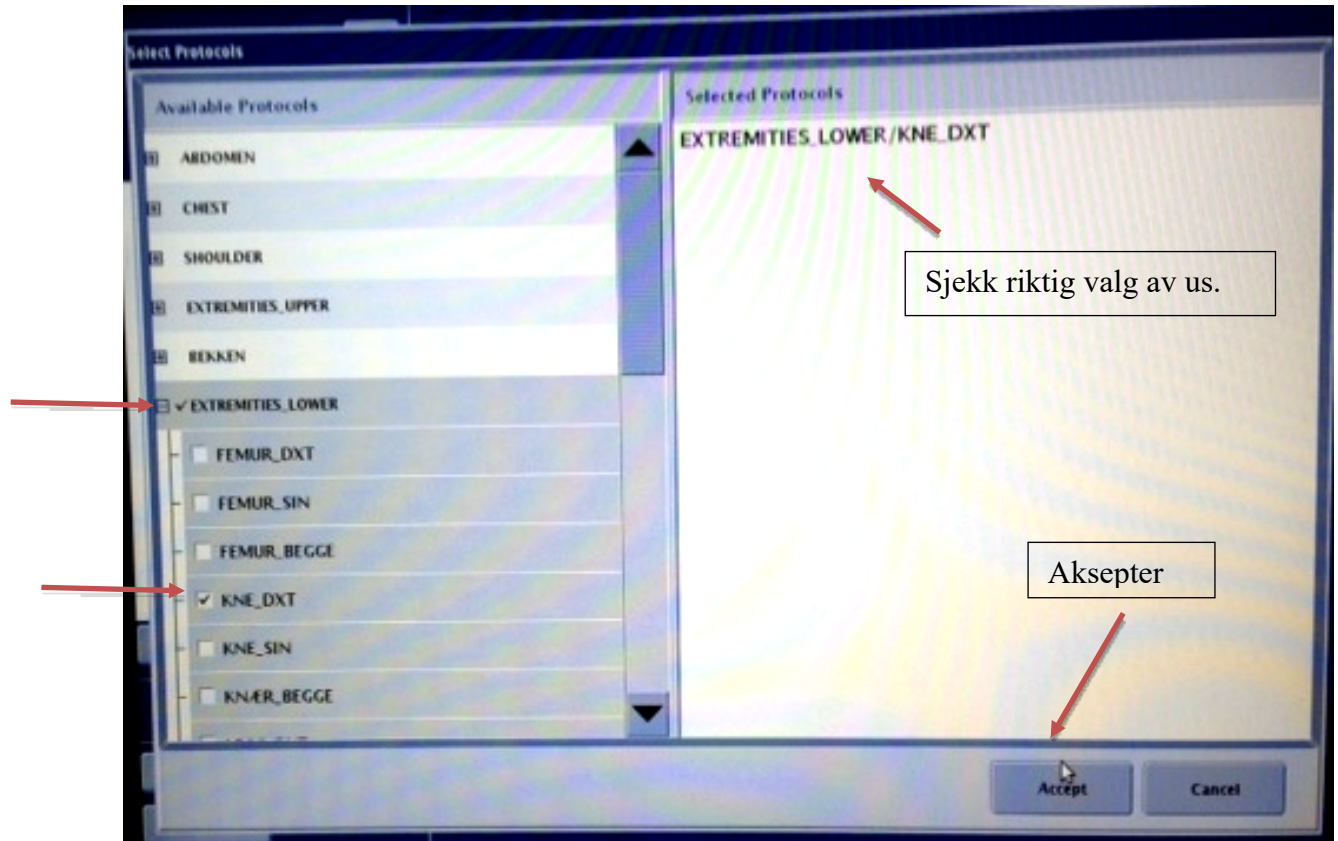

**Vedlegg:**

**Kryssreferanser:**

**Eksterne referanser:**

Link: [Brukermanual Discovery XR656 norsk versjon i Merida-web](#)