

HAMILTON C6 - Kontrollskjema for klargjøring, 1CC, SSA

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.2-4

Godkjent dato:

20.11.2024

Revideres innen:

20.11.2026

Sist endret:

20.11.2024

Revisjon:

2.03

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Etter maskinen har vært i bruk: (Hukk av når utført)	
Kast brukt slangesett	
Ta ut ekspirasjonsventil <ul style="list-style-type: none"> - Den gjennomsiktede (engangs) kastes etter bruk - Den blå (flergangs) deles i to og vaskes i maskin. Brukes normalt ikke 	
Husk å skifte sug på maskinen hvis det har vært i bruk	
Vask over maskinen med Saniswiss og rydd i kabler/ledninger <ul style="list-style-type: none"> - O2-kabel – henges ryddig på maskinen - Strømledning - Ledning til inhalasjon (aerogen) – henges ryddig på maskinen 	
Sett i ny/ren ekspirasjonsventil – pass på at den kommer ordentlig i hakk	
Monter nytt slangesett med fukter – husk flowsensor (Ikke kast kne eller kalibreringsadapter)	
Sett på filter på inspirasjon (rundt filter) - og ekspirasjonsventil (Firkantet Hepafilter)	
Monter på forstøversett. Består av tre deler: Kne, forstøverkammer og Y-stykke	
Utfør preop kontroll (Velg preop kontroll på maskinen. Du skal kun teste: <ul style="list-style-type: none"> - Tetthet - Flowsensor 	
Kontroller at maskinen er innstilt på NIV	
Kontroller at det er nok oksygen på O2 kolbene	
Skrus av maskinen (Innstillingene tilbakestilles automatisk når maskinen skruses av)	
Koble maskinen til veggstrøm inne på bipap rom – når ikke i bruk	
Heng denne sjekklisten på maskinen.	
Dobbeltkontroller at dette er gjort.	
Før maskinen tas i bruk:	
- Koble til sterilt vann til forstøver	
- Kontroller at maskinen er innstilt på NIV	
- Velg ALLTID «voksen/pedi.»	
- Fyll ALLTID inn høyde og kjønn (maskinen regner ut idealvekt)	

Dato og dobbeltsignatur:

Kryssreferanser
Eksterne referanser

Utarbeidet av: AIO/Angela Martinez-Pettersen/Tonje Altenborg	Fagansvarlig: Thomas Dahlslett	Verifisert av:	Godkjent av: Nina Roland	Dok.nr: D51223
--	--	----------------	------------------------------------	--------------------------