

## Kortfattet bruksanvisning Olympus ESG-400 Diatermiapparat

### Olympus Diatermi apparat, stue 7. Enkel bruksanvisning

Av/på knapp. Touch panel.

Displayet er delt i 4 vinduer, et til hvert av diatermihullene. Nedst til venstre er skjermen til TUR. Spesiell ledning som ligger på TURIS rista. Høye verdier, pga at det er mer motstand i saltvann. Apparatet leser vevet og gir den nødvendige strømmen av seg selv, gir ikke max hele tiden.

På program knappen «Select Procedure» får vi opp ferdiglagrede programmer. Er du inne i et program og skal tilbake til hovedmenyen, trykker du på et lite hus nede i høyre hjørne. Les alltid programmet før operasjonsstart, så du har riktig effekt.

**TUR-P:** «Ole på tur» til Ole (Har effekt 3). De andre bruker ofte «TUR-P» (effekt 2). Effekt kan endres i begge programmene, ved å trykke på den lille sirkelen ved siden av tallet.

**TUR-B:** Bruk programmet «TUR-P». Operatørene starter med effekt 2, og kan velge å øke til effekt 3 ved behov. (Trykke på knappen med sirkelpil ved tallet).

**Fimose:** Bipolar. Velg «select procedure», Autostart. (Da skal det vises en liten blå virvel oppe i programmet).

**Generell kirurgi:** «Select procedure». Velg «TURIS» programmet(!!!) Velg skjermdelen øverst til høyre, og sett den monopolare ledningen i kontakten tilsvarende bildet.

Pedalen er todelt, både til bipolar og monopolar bruk. Pedalen skal ha pose på. Kan vaskes, men ikke dyppes i vann. Ikke dra i ledningen! Bruk håndtaka..