


Kortfattet bruksanvisning Harmonic Ultracision

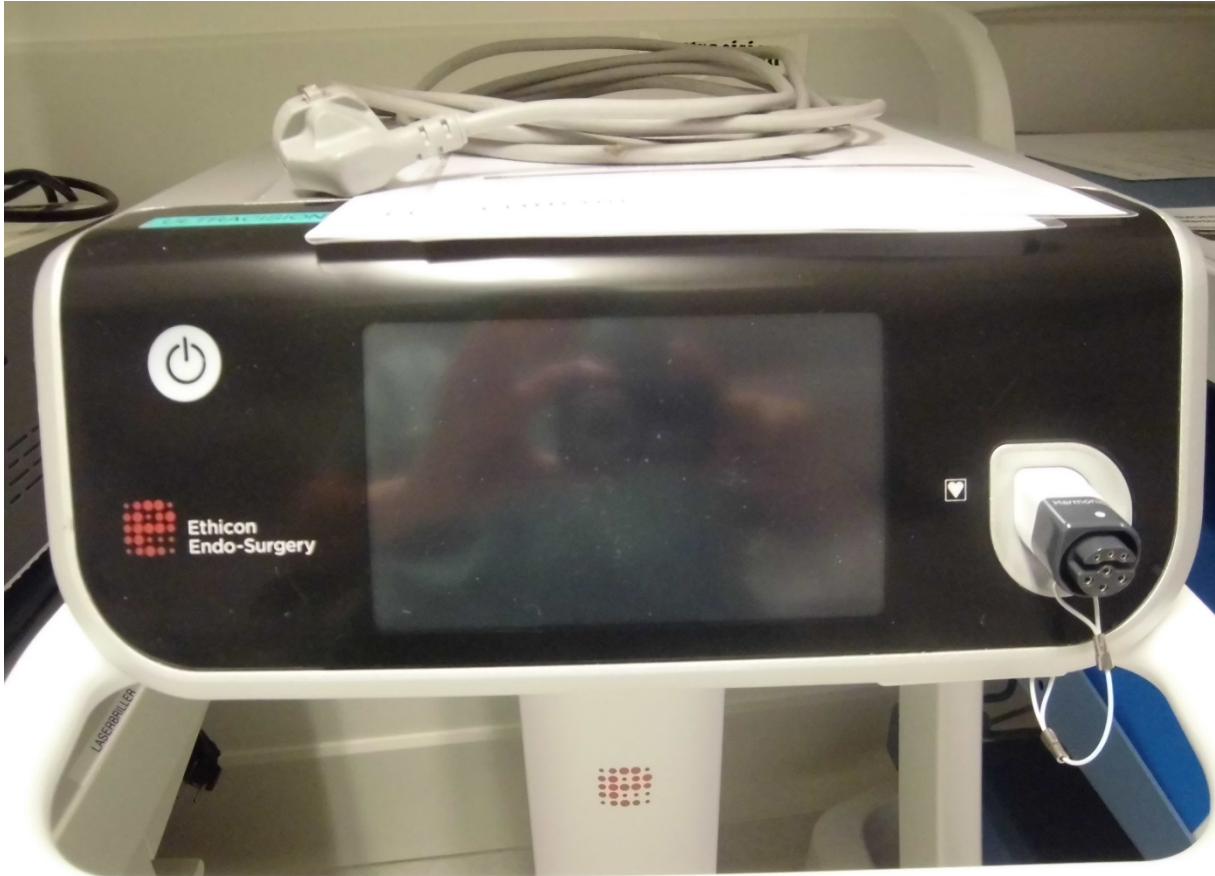

**HARMONIC FOCUS®+ saks**  
**Monteringsguide**

Montering

Instrument      Håndstykke

Ved bruk av steril teknikk, fjern instrumentet fra emballasjen

Hold i håndstykket og fest instrumentet ved å rotere med klokken på håndstykket

Bruk momentnøkkel til å stramme instrumentet på håndstykket. Skru momentnøkkel med klokken, hold kun i håndstykket. Klikker to ganger.\*

Fjern momentnøkkelen fra instrumentet. Ikke kast momentnøkkelen inntil det kirurgiske inngrepet er ferdigstilt.

Forhåndstesting \*Hvis du ikke følger denne monteringsmåten kan utilsiktet skade forårsakes på HARMONIC®-saksen eller flergangs håndstykket.

Aktiver instrumentet i 2 sekunder for å kjøre testen. Ved feil er det røde lys på skjermen på instrumentet.

Tester

3 5

Koble det monterte håndstykket og instrumentet til generatoren og skru på generatoren. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre. Skjermbilde for testing vises når oppstartssekvensen er fullført. Aktiver instrumentet (ved å trykke ned en av aktiverings knappene) med åpne kjever i 2 sekunder for å kjøre testen, til HARMONIC®-skjerm bilde vises.

Festing av momentnøkkelen

Lukk klemmearmen og plasser momentnøkkelen over den distale enden av instrumentet.

Se bruksanvisningen og generatorens brukermanual for alle produkt detaljer, inkludert en fullstendig liste over advarsler og forhåndsregler.

AD188\_NO ver10 2014 Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH  
www.ethicon.com