



1. Skru på apparatet



2. Kople til gass-slangen fra sterilt felt på metalluttak.



3. Gasstrykk vurderes av kirurg etter størrelse/vekt og stilles ved bruk av + og - knapp, vanligvis:  
 Voksen 12 mmHg,  
 Fedme 15 mmHg  
 Barn >12mmHg



4. Start gass-insufflasjon



5. Når kirurg er fornøyd med første portplassering stilles insufflatoren på «High Flow»



6. Ved behov kan gassinsufflasjon settes på pause ved å trykke på «Start/Stop» knappen i høyre hjørne, underveis i operasjonen. Startes igjen ved å trykke på samme knappen.
7. Ved endt operasjon skrues maskinen av med grønn knapp.