

		Medisinsk serviceklinikk		Generelt dokument	
Objektglassetiketter. BenchMark Special Stains. Enhet for histologi, Avdeling for patologi, SSK				Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.4.1-1		Godkjent dato: 08.05.2023	Gyldig til: 08.05.2025	Dato endret: 08.05.2023	Revisjon: 2.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

DISTRIBUSJONSliste: EK, Ved BenchMark Special Stains

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endringer i forbindelse med LVMS

HENSIKT

Fremgangsmåte for hvordan lage og printe ut objektglassetiketter til bruk i spesialfargeinstrumentet BenchMark Special Stains. Brukes kun til testkjøringer og som nødløsning i tilfeller der instrumentet ikke vil godta merking fra LVMS.

OMFANG

Gjelder for bioingeniører med opplæring i bruk av spesialfargeintstrumentet BenchMark Special Stains og softwareprogrammet Ventana Special Stains, ved Enhet for histologi, Avd. for patologi, SSHF.

BAKGRUNN

For nærmere beskrivelse se [brukerveildning](#).

AKKREDITERT

Ja

UTFØRELSE

- Det velges analyse for hver bestilling.
 Eksempel: Samme analyse bestilt på fem ulike H-nummer, legges inn fem ganger til sammen.
 Unntak: Samme analyse bestilt flere ganger på samme H-nummer, legges inn én gang, dersom det er plass til flere snitt på samme objektglass.

1. Home View – Create Labels – Protocols → Dobbeltklikk/Add på ønskede analyser
2. Ønskede analyser er valgt → Close/print
3. I vinduet Ventana Slide Labeling System: Velg aktuell patolog eller «immun» fra liste
Skriv inn blokknummer
Skriv inn H-nummer
4. Kontroller forhåndsvisning av etikett → Enter/Print
5. Etikettene forsegles og festes godt, sentralt på merkefeltet.




Ny etikett: Order View  → marker ønsket bestilling →  → Print

NB! Etter endt kjøring, må merkelappene som er limt på som nødløsning fjernes. Marker snittet som farget i LVMS.

DokumentID:D52000

Utarbeidet av: Fagbioing. Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 07.05.2023 - Linda Kvelland Skaara
---	-------------------------------------	--	---

 SØRLANDET SYKEHUS	Objektglassetiketter. BenchMark Special Stains. Enhet for histologi, Avdeling for patologi, SSK				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.4.1-1	Utarbeidet av: Fagbioing. Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent dato: 08.05.2023	Godkjent av: Avdelingsjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 2.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

Vedlegg:

O:\Medisinsk serviceklinikk\Avdeling for patologi SSK\Histologi\Felles\Histologi\BencMark Special Stains Ventana\Brukerveiledning_BSS_VSS.pdf

Kryssreferanser:

[II.MSK.Pat.2.3.2.1-6](#)

[Nedskjæringer og spesialfarger, Histologilaboratorium, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK](#)

Eksterne referanser: