

		Medisinsk serviceklinikk			Prosedyre
Bulkreagenser. BenchMark Special Stains. Histologilaboratoriet, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK				Side 1 av 3	
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.4.1-3		Godkjent dato: 23.10.2023	Gyldig til: 23.10.2025	Dato endret: 23.10.2023	Revisjon: 3.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Ved BenchMark Special Stains

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til hvordan rester av løsningene skal fjernes

HENSIKT

Beskrive tillaging og håndtering av bulkreagenser til spesialfargeinstrumentet BenchMark Special Stains.

OMFANG

Bioingeniører med opplæring i bruk av BenchMark Special Stains og softwareprogrammet Ventana Special Stains. Det henvises til [brukerveiledningen](#)

AKKREDITERT

Ja

SIKKERHET

Hansker og vernebriller benyttes.

BAKGRUNN

Instrumentet trenger tre bulkreagenser for å kunne utføre en fargekjøring:

- DEPAR, avparafineringsløsning, i posisjon 1
- LCS, oljeløsning for å forhindre fordamping, i posisjon 2
- WASH, vaskeløsning i posisjon 3

UTFØRELSE

Registrering av nye løsninger

- Scanneren holdes over produktes 2D-barkode.
- Dersom produktet ikke har 2D-barkode, men en minneknapp i metall, brukes registreringsproben til å avlese og laste inn informasjonen.

1 DEPAR, tillaging og fylling:

Holdbarhet: 12 uker.


- Tøm ut rester i kanner sammen med annet avfall fra instrumentet (avfallstoffnummer 7151).
- Skyll syreballong (20-litersbeholder) og bulkflaske grundig med deioinsert vann.
- 18 L deionisert vann i en ren 20L syreballong.
- 2 L konsentrert BenchMark Special Stains Deparaffinization Solution (10x).
- Bland godt.
Løsningen er holdbar på syreballongen i 12 uker.
- Fyll tilhørende bulk-flaske fra instrumentet fra syreballongen.
- Plassér i instrumentets posisjon 1.

2 LCS, fylling:

- Brukes i konsentrert form. Helles direkte i bulk-flasken på instrumentet.
OBS! Flasken må aldri skylles med vann.

DokumentID:D52052

Utarbeidet av: Fagbioing. Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 20.10.2023 - Linda Kvelland Skaara
---	-------------------------------------	--	---

 SØRLANDET SYKEHUS	Bulkreagenser. BenchMark Special Stains. Histologilaboratoriet, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK				Side: 2 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.4.1-3	Utarbeidet av: Fagbioing. Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent dato: 23.10.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 3.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

- Plassér i instrumentets posisjon 2.

3 WASH, tillaging og fylling:

Holdbarhet

Syreballong(20-litersbeholder).: 12 uker.

Bulkflaske: 5 dager.

- Tøm ut rester i vanlig avløp og skyll syreballong og bulkflaske grundig med deionisert vann.
- 20 L deionisert vann i en ren syreballong
- Plassér på tilhørende røreplate, ha i magnetrørestav og rør på middels hastighet.
- BenchMark Special Stains Wash II består av to flasker som helles i di-vannet.
Surfactant solution – Flasken holdes opp ned i 30 s. for å tømmes helt.
Biocide solution – Flasken holdes opp nedi 10 s. for å tømmes helt.
- La røre på middels hastighet i minimum 10 min.
- Tapp ut en liten mengde og kast.
- Fyll ren tilhørende bulkflaske fra instrumentet, cirka halvfull.
- Plassér i posisjon 3 i instrumentet.
- La den andre posisjonen merket 3 være tom.

4 OPTION


- Fyll i litt fortynnet WASH-løsning
- Plassér i posisjon 4

Vedlegg:

O:\Medisinsk serviceklinikk\Avdeling for patologi SSK\Histologi\Felles\Histologi\BencMark Special Stains Ventana\Brukerveiledning_BSS_VSS.pdf

Kryssreferanser:

Eksterne referanser:

 SØRLANDET SYKEHUS	Bulkreagenser. BenchMark Special Stains. Histologilaboratoriet, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK				Side: 3 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.4.1-3	Utarbeidet av: Fagbioing. Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent dato: 23.10.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 3.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium