

		Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre
Vedlikehold. BenchMark Special Stains. Histlab. Enhet for histologi. Avd. f. patologi. SSK				Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.4.1-4	Godkjent dato: 23.10.2023	Gyldig til: 23.10.2025	Dato endret: 23.10.2023	Revisjon: 3.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

DISTRIBUSJONSliste: EK, papirutgave i Tarifold-stativ ved spesialfargeinstrument.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: endret fra avfallstoffnummer 7152 til 7151

HENSIKT

Fremgangsmåte for utførelse av vedlikehold av Ventana BenchMark Special Stains-systemet.

OMFANG

Bioingeniører med opplæring i bruk av spesialfargeinstrumentet Benchmark Special Stains (BSS) og softwareprogrammet Ventana Special Stains (VSS).

BAKGRUNN

For at systemet skal fungere optimalt.

AKKREDITERT?

Ja.


SIKKERHET

Hansker og vernebriller anbefales ved:

- Klargjøring av cleaningreagenser.
- Tømming av avfallsbeholder i avtrekk.

UTFØRELSE

Daglig vedlikehold

1. Tørk av ytre overflater med et fuktig papirhåndkle.
2. Sjekk at objektglassposisjoner er tømt.
3. Kjøre rengjøringssyklus (cleaning)
 - Bruk **Special Stains cleaning kit**. Klikk på plass i reagenskarusellen og ta av hetter.
 - Start programmet ved å trykke på børsteikonet  i instrumentvisningen. Varighet: ca 17 min
4. Etterfyll bulkreagenser.
5. Tøm avfallsdunk over i tomme plastkanner hvis indikatoren er rød. Utføres i avtrekk.

Merk plastkanner med rød etikett for «Farlig avfall» (se utfylling neste side)



og faremerke

DokumentID:D52091

Utarbeidet av: Fagbioing. Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 20.10.2023 - Linda Kvelland Skaara
---	-------------------------------------	--	---

		Vedlikehold. BenchMark Special Stains. Histlab. Enhet for histologi. Avd. f. patologi. SSK			Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.4.1-4	Utarbeidet av: Fagbioing. Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent dato: 23.10.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 3.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

FARLIG AVFALL	
Innhold:	Organisk avfall med halogen
Avfallstoffnummer:	7151
EAL Kode:	
Avdeling:	Patologi
Dato:	<i>Dato for når oppsamlingen startet</i>
Signatur:	<i>Den som leverer på avfallsrommet</i>

6. Signér på [eget skjema](#) for utført vedlikehold.

Ukentlig vedlikehold

1. Wash-løsning i instrumentets bulkflaske 3 tømmes, skylles med DI-vann og settes til tork.
2. Påse at minnepinne er koblet til på baksiden.
3. Hjemvisning – System - Maintenance
 - Vedlikeholde databasen: Velg Database maintenance.
 - Sikkerhetskopiere databasen: Velg Backup database.
4. Starte VSS på nytt ved å velge Exit.
Hvis spørsmål om sikkerhetskopiering, velg Ja.
Fra startmenyen velg Avslutt og Start på nytt, eventuelt Slå av.
Hvis PC-slås av, slå i så fall også av fargeinstrumentet.

Månedlig vedlikehold

Gjøres av superbruker.

Henvises til [brukerveiledning](#).

Kvartalsvis vedlikehold

Gjøres av superbruker.

Henvises til [brukerveiledning](#).

Kryssreferanser:

[II.MSK.Pat.2.3.2.4.3-1](#)

[Vedlikehold. BenchMark Special Stains og VSS. SKJEMA. Histlab. Histologisk enhet. Avd. f. patologi. SSK](#)

Eksterne referanser:

[O:\Medisinsk serviceklinikk\Avdeling for patologi SSK\Histologi\Felles\Histologi\BencMark Special Stains Ventana\Brukerveiledning BSS VSS.pdf](#)