


## Bruksanvisning kortfattet mageleie Wilson - operasjon SSA

Side 1 av 3


Dokumentplassering:  
II.SOA.AIO.OPA.2.div-43Godkjent dato:  
21.11.2022Revideres innen:  
21.11.2024Sist endret:  
21.11.2022Revisjon:  
0.01Klinikknivå/Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasienter og brukere  
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

## Bruksanvisning kortfattet mageleie Wilsonpute

1 Legg bleiekladd og spesialhodepute for inntubering på plass

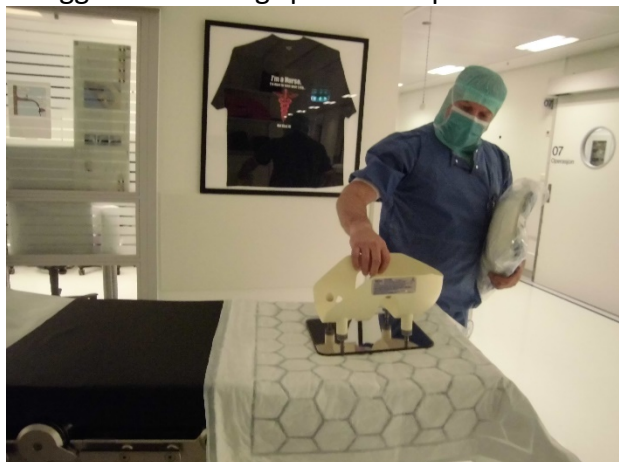

2 Legg ringer og puter til beina ved fotenden

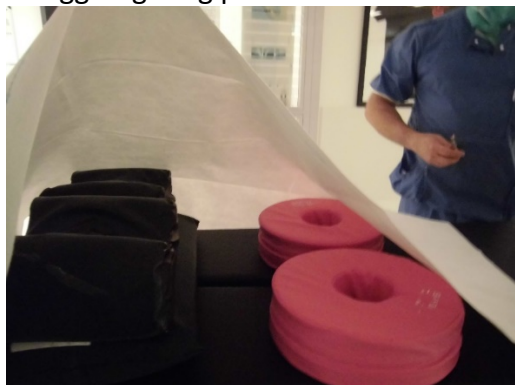


3 Engangs skumgummi legges i hodeskål

Utarbeidet av:  
Olga Karin HarnesFagansvarlig:  
Kristina Løvslund HusetVerifisert av:  
[]Godkjent av:  
Ikke styrtDok.nr:  
D52157

Dokument-id:  
II.SOA.AIO.OPA.2.div-43Utarbeidet av:  
Olga Karin HarnesFagansvarlig:  
Kristina Løvslund HusetGodkjent dato:  
21.11.2022Godkjent av:  
Ikke styrtRevisjon:  
0.01

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasienter og brukere

#### 4 Legg Wilson puten kant i kant med andre sprekk i fra hode ende

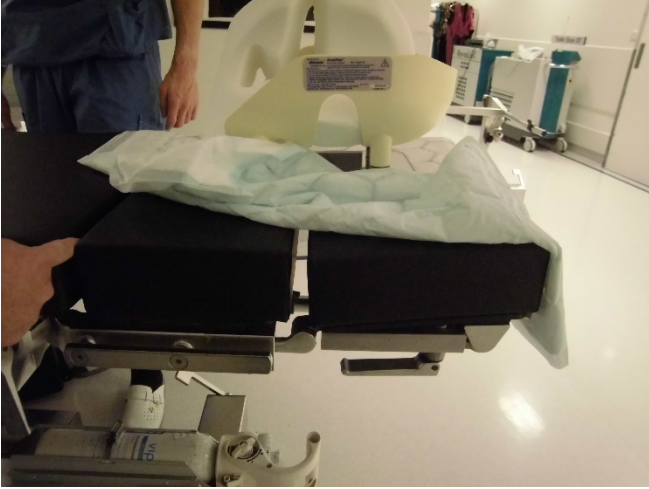

Hjulene på puten skal opp mot hodeenden



Trykk inn rød knapp for å regulere bredden på puten. Mål pasientens bredde mellom hoftekamene, og juster magebøyler til målet.



Dokument-id:  
II.SOA.AIO.OPA.2.div-43Utarbeidet av:  
Olga Karin HarnesFagansvarlig:  
Kristina Løvslund HusetGodkjent dato:  
21.11.2022Godkjent av:  
Ikke styrtRevisjon:  
0.01

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasienter og brukere

Blått papir legges under og tres på magebøyer.



Eggskumgummi under reim oppe på ryggen og over setet.

Begge armer i armholder. Blå skumgummi legges under armene, pass på å ikke få drag i skulder og nakke, juster høyden på armholder for å tilpasse.

Sveiv opp rygg etter kirugens ønske. Magen og bryst skal ligge mest mulig fritt, og genitalia fritt.