

## Pusen -operasjon SSA

Side 1 av 1

Dokumentplassering:  
**II.SOA.AIO.OPA.2.div-20**Godkjent dato:  
**03.03.2023**Revideres innen:  
**03.03.2025**Sist endret:  
**03.03.2023**Revisjon:  
**0.01**

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 03.03.2025 uten endringer i dokumentet.

Pusen (stue 7)

Trykk på on

Kople til kamera

Trykk på hvitebalanse på pusen

Trykk på port A på (TV)skjermen



Hvis du skal ha opptak må du stille «lillepusen, Aten boksen» på 2.



Det grønne lyset må lyse til høyre =2 (ikke venstre som på bilde)