

Skjema for månedlig vedlikehold på Aurora aferesemaskin, Blodbanken SSA

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.MSK.Lab SSA.BB.2.2.1-13

Godkjent dato:

20.03.2023

Gyldig til:

20.03.2025

Dato endret:

20.03.2023

Revisjon:

1.01

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Tapping av blodgivere

DISTRIBUSJONSliste: EK,

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 20.03.2025 uten endringer i dokumentet.

År: Maskin:

Kolonnene signeres og dateres

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Tørk reservoarkanalene, hemoglobindetektorføringen og luftdetektorkanalene med en tørr vattpinne med linsepapir rundt (se bilde,1)												
Tørk pumperullene med tørt linsepapir og kontroller at de beveger seg fritt (se bilde,2)												
Kontroller om det er blokkeringer eller utvendige skader på transduserens luerkoblinger (se bilde,3)												
Fjern og støvsug det nedre luftfilteret, sett på plass igjen (se bilde, 4)												

Ved skader eller behov for utskiftning kontaktes fagbioingeniør tapping og produksjon, ev kvalitetskoordinator.

DokumentID:D52408

 Utarbeidet av:
Fagbioingeniør Katrine Flaath



 Fagansvarlig:
Fagbioingeniør tapping og produksjon

 Godkjent av:
Enhetsleder Synnøve Næsse

 Verifisert av:
24.02.2021 - Kvalitetskoordinator Vivi Eide Bengtson

Dokumentplassering:
II.MSK.Lab SSA.BB.2.2.1-13Utarbeidet av:
Fagbioingeniør Katrine FlaathFagansvarlig:
Fagbioingeniør tapping og produksjonGodkjent dato:
20.03.2023Godkjent av:
Enhetsleder Synnøve NæsseRevisjon:
1.01

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Tapping av blodgivere

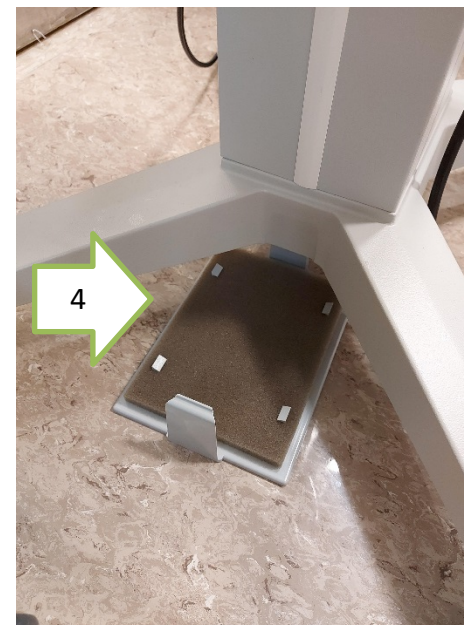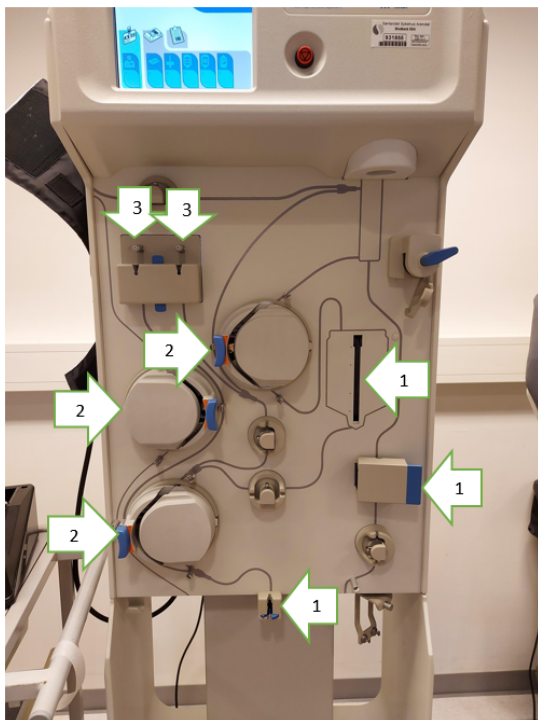

Arkivering

Oppbevares i perm merket «Vedlikehold Trima og Aurora» på tapperom, når ferdig utfylt scannes det og lagres i mappestruktur og EK.

Kryssreferanser:

[II.MSK.Lab SSA.BB.2.2-12](#)

[Tapping av aferesegiver på Aurora, Blodbanken SSA](#)

[II.MSK.Lab SSA.BB.2.2.2-1](#)

[Sjekkliste - arbeidsoppgaver Tapperom. Blodbanken SSA](#)

Eksterne referanser: [Brukerhåndbok, Aurora](#)