

Intensiv seng - Multicare bruksanvisning kortversjon SSK

Side 1 av 2

 Dokument ID:
1.6.10.1-61

 Godkjent dato:
11.12.2023

 Gyldig til:
11.12.2025

 Revisjon:
0.01

Virksomhetsstyring/Teknologi og innovasjon/MTU - brukerveiledninger

Brukes ikke til pasienter med mistanke om eller verifisert spinalskade.

Nullstille vekt/veie pasient: Kontroller at senga er redd opp med laken, silkelaken, dynetrekk, kladd og pute m/trekk

- Senk senga til ca 20 cm over nederste nivå før man nullstiller
- Trykk på ZERO/T –symbol og hold inne til vektverdien begynner å blinke, slipp og trykk deretter på symbolet ZERO/T igjen for å bekrefte «0» kg
- Pasientens vekt vises på skjerm i vektbilde eller madrassbilde.
- NB! IV-stativ må plasseres på sengeramme for at dette eller utstyr som henges på ikke blir med i vekt. Husk at alt som henges/legges på selve sengen etter nulling vil være med i vektberegning som vises. Pumpe, iv-pose, dyne, urin/drenspose etc

Madrass

- Når pasienten legges i seng vil et foreslått madrassstrykk ut fra pasientens vekt komme opp, godkjenn det ved å trykke på grønn hake
- Hvis pasienten har behov for hardere eller mykere madrass, justerer man madrassstrykket med +/- symbolene
- «**CLP**»-kontinuerlig lavt trykk=OPTIREST, denne er alltid aktiv bortsett fra ved **MAX**=maks oppblåst. Blinker når den er aktiv, justeres ca hver 30 sek. NB avhengig av strøm, CLP-funksjonen slås av ved seng i batterimodus. Madrass forblir oppblåst, men ingen behandling skjer. Viktig at senga er tilkoblet strøm!
- «**MCM**» er microclima-management, vifte som sirkulerer luft i madrassen for å redusere kondens og fuktig hud som gir økt fare for trykksår. Kan startes og stoppes etter behov, trykk på ikon.
- «**SLEEP**», reduserer CLP-syklus til hvert 30 min og halverer effekt av MCM med 50%
- «Økt trykk i seteparti-symbolet» øker trykket lineært ift seteseksjonen i henhold til ryggstøttens posisjon, kan deaktiveres for lettere pasienter eller hvis pasienten synes dette er ubehagelig (trykk på ikonet)

Vendefunksjon - erstatter IKKE ordinær manuell snuing av pasient

- Trykk på «**LUNGE**»-symbol og deretter hold inne sengesymbol som kommer frem i displayet helt til senga står i utgangsposisjon og meny for Vende-program kommer frem.
- Still inn antall minutter ved å trykke på ikonene over streken, 0-30 min
- Still inn vinkel ved å trykke på ikoner under streken, 0-30 grader
- Deretter holder du inne TEST-knapp og kontrollerer at respiratorslanger, iv-slanger osv ikke får overstrekking
- Når testen er gjennomført kan du starte programmet
- Gjør man endringer i programmet eller endrer for eksempel ryggstøtte, må man ta test på nytt.

Motor

- ON/OFF nederst ved hode-ende.
- Man må holde hånden på sensor på høyre hånd mens man trykker på forward/rewind-knappene.
- NB! Hjulene vil være låst ved bruk av denne funksjonen og vanskeliggjør sidebevegelse i heis på CT osv
- Brukes minst mulig

O2-kolbe

- Festes på stativ ved hodeende

Rtg-kassett

- Passer ikke i til SSK røntgen dessverre

 SØRLANDET SYKEHUS	Intensivseng - Multicare bruksanvisning kortversjon SSK				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.6.10.1-61	Utarbeidet av: Intensiv SSK	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 11.12.2023	Godkjent av: Ikke styrt	Revisjon: 0.01

Virksomhetsstyring/Teknologi og innovasjon/MTU - brukerveiledninger

Kryssreferanser

Eksterne referanser