

**Rengjøring av makrobord, Makro, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK**

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

**II.MSK.Pat.2.3.1.1-10**

Godkjent dato:

**18.05.2025**

Gyldig til:

**18.05.2027**

Dato endret:

**18.05.2025**

Revisjon:

**16.00**

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Makro

DISTRIBUSJONSliste: EK

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Redigert småting, ingen vesentlige endringer.

## Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniører og spesialbioingeniører, histologisk enhet.

## Hensikt

Beskrive hvordan makrobordet skal rengjøres etter makrobeskjæring.

## AKKREDITERT?

Del av akkreditert virksomhet

## Handling

1. Brukt engangsutstyr kastes.
2. Brukt skalpellblad kastes i gul boks.

### Lillemakro:

**Hver dag:** Makrobenkene vaskes med vann/sprit/såpe (etter behov) og tørkes av «uttaker» selv.**En gang i uken:** Vask makrobenkene og instrumentene i 1% Virkonløsning av «uttaker» selv (Se beskrivelse på Virkonboksen).

### Stormakro:

**Hver dag:)**

- Makrobenker og brukt utstyr vaskes med vann/sprit/såpe (etter behov) og tørkes av uttaker.
- Utstyret legges tilbake på skjæreplaten av uttaker.
- Spesialbioingeniørene (ved fravær Makro 1 eller andre fra lillemakro) sjekker at det er nok forbruksmateriell og nødvendig utstyr på plass til neste dag. Sjøppel tømmes ved behov.

**Hver mandag (kan utføres fredag om man har tid), utføres av spesialbioingeniør:**

- Makrobenkene vaskes grundig med sprit/såpe og brukt utstyr vaskes i oppvaskmaskinen eller i bøtte med 1% virkonløsning.
- De perforerte ristene i vaskene tas opp og vaskekummene renses og vaskes med såpe.
- Fyll på papir, hansker, tusj, knivblader, sur formalin, sprit, formalin, lymfeknutevæske og annet nødvendig forbruksmateriell.

DokumentID:D01874

Utarbeidet av: <b>Fagbioingeniør Linda Merete Lie Røgeberg</b>	Fagansvarlig: <b>Linda Merete Lie Røgeberg</b>	Godkjent av: <b>Avdelingsjef Hilde Bjørnestøl Hansen</b>	Verifisert av: <b>15.05.2025 - Linda Kvelland Skaara</b>
---	---	---	---