

 SØRLANDET SYKEHUS				Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre	
Merking av objektglass, Enhet for histologi, Avd. for patologi, SSK						Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.1-5			Godkjent dato: 19.05.2025	Gyldig til: 19.05.2027	Dato endret: 19.05.2025	Revisjon: 10.02	

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

DISTRIBUSJONSLISTE: EK

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 19.05.2027 uten endringer i dokumentet.

Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniører ved Enhet for histologi.

Hensikt

Denne prosedyre beskriver hvordan objektglass skal merkes før snitt festes på.

Utstyr

Merking direkte på glass: Merkemaskin SlideMate
Svertebånd: SHA A83910001
Objektglass: malt skrivefelt (ikke frostet), Claritex eller andre glass som er testet internt.

Merking på etikett: Zebra etikettskriver
Svertebånd: Outside ink rolls Black Eson Pac L1487-11074.
Etiketter: Xylenfaste Etiketter Eson Pac 4003909.
Objektglass: Epredia-glass med eller uten frostet skrivefelt. Egne glass til megasnitt.

Handling

Merking ved hjelp av merkemaskin SlideMate

1. Blokk scannes inn i labdatasystemet LVMS, tramstop Snitting, «Les inn blokk».
2. Sjekk at informasjon er overført til SlideMate. Informasjon vises på illustrasjon av objektglass på displayet.
3. Merk glass ved å trykke på «play»-ikonet på displayet. Eller slipp glass ned manuelt med skrivefeltet øverst og vendt frem.



DokumentID:D01944

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 28.03.2023 - Linda Kvelland Skaara
---	-------------------------------------	--	---

 SØRLANDET SYKEHUS	Merking av objektglass, Enhet for histologi, Avd. for patologi, SSK				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.1-5	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent dato: 19.05.2025	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 10.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

Merking med etiketter

1. Blokk scannes inn i labdatasystemet LVMS, tramstop Registrering.
2. Huk av riktig blokk, deretter riktig glass.
3. Dersom PCen i bruk er koblet til etikettskriver og ikke til SlideMate:
 - Klikk på de tre prikkene på høyre side av raden for glass
 - Velg Etikettutskrift, Glassetiketter (alle – også utskrevne)
Dersom PCen er koblet til SlideMate og ikke har egen etikettskriver:
 - Høyreklikk på de tre prikkene på høyre side av raden for glass
 - Velg Etikettutskrift, Etiketter – valgfri etikett
 - Velg ønsket etikettskriver i det øverste feltet (Etiketter)
 - Klikk i feltet under (Etikettskrivere), skriveren legges automatisk inn.
4. Lim etiketten øverst på glasset slik at ingen deler av etiketten stikker utenfor glasset.