

		Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre
Veiging og snittuttak. Avd. for patologi SSK				Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.5-8	Godkjent dato: 09.09.2024	Gyldig til: 09.09.2026	Dato endret: 09.09.2024	Revisjon: 7.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Obduksjon
 DISTRIBUSJONSLISTE: EK og perm på kontoret, obduksjonsseksjonen.
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til link til veieskjema

Omfang

Denne prosedyre gjelder for obduksjonspreparanter, bioingeniører sertifisert for obduksjon og LIS-leger, Avdeling for patologi.

Hensikt/Indikasjon

Registrere organvekt.
 Fremstilling av vevsblokker.

Veiging og snittuttak

Veiging av organer:

Etter dissekering, legges organene anatomisk orientert i metallbakke av LIS-lege. Alle organene skal veies og vekt føres på skjema [Veieskjema voksenobduksjon. Avd. for patologi SSK](#) eller [Veieskjema fosterobduksjon. Avd. for patologi SSK](#), dette ligger ved siden av vekten på obduksjonssalen.

Snittuttak:

Vevssnitt legges i blå kassetter, disse skrives ut på kassettemaskin på stormakro.

Følgende rutinesnitt tas ut:

- 1: Øvre og nedre lungelapp venstre
- 2: Øvre og nedre lungelapp høyre
- 3: Høyre og venstre nyre (Høyre side firkantbeskjæres og venstre side trekantbeskjæres)
- 4: Hjerte (ventrikkel og septum)
- 5: Lever

I enkelte tilfeller brukes et mer omfattende snittuttak:

- 1: Hjerte, venstre ventrikkel
- 2: Hjerte, høyre ventrikkel.
- 3: Hjerte, septum.
- 4: Hjerte, atrium.
- 5: Lunge, høyre overlapp.
- 6: Lunge, høyre midtlapp.
- 7: Lunge, høyre underlapp.
- 8: Lunge, venstre overlapp.
- 9: Lunge, venstre underlapp.
- 10: Lever.
- 11: Nyre, høyre.
- 12: Nyre, venstre.

Hvilket oppsett av snittuttak som brukes og eventuelle ekstrasnitt bestemmes av LIS-lege og eventuelt overlege. Ekstrasnitt føres nederst på veieskjema, merket «Ekstrasnitt».

Kassettenes legges i beholder med formalin (10 % bufret formalin).

Etter 1-2 dager skiftes formalinen, deretter settes beholderen på fremføringsrom.

DokumentID:D02072

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Stine Wathne	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Stine Wathne	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 09.09.2024 - Linda Kvelland Skaara
--	---	--	---