

		<b>Medisinsk serviceklinikk</b>		<b>Prosedyre</b>	
<b>Nedskjæringer og spesialfarger, Histologilaboratorium, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK</b>				Side 1 av 2	
Dokumentplassering: <b>II.MSK.Pat.2.3.2.1-6</b>		Godkjent dato: <b>14.05.2023</b>	Gyldig til: <b>14.05.2025</b>	Dato endret: <b>17.10.2023</b>	Revisjon: <b>15.01</b>

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

DISTRIBUSJONSLISTE: EK

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Ingen endring, åpnet feil dokument

## Omfang

Denne prosedyre gjelder for bioingeniører med opplæring i spesialfargefunksjonen ved histologilaboratoriet.

## Hensikt

Hensikten med denne prosedyre er å beskrive hvordan etterbestillinger av nedskjæringer og spesialfarger skal håndteres.

## Handling

- Legene legger inn bestilling på nedskjæring og spesialfarger i LVMS. I enkelte tilfeller bestilles spesialfarger rutinemessig av bioingeniør.
- Bestillingene må være gjort innen kl 0700 på morgenen for å være sikret at prøven blir utlevert samme dag.
- Etterbestillingslisten sjekkes igjen kl 13. Spesialfarger og DDD (Dypeste snitt) prioriteres.
- Sørg for at snittene blir farget med riktig farge.
- Lever etterbestillingsliste til fargelab etter fullført snitting.
- NB! Sjekk i mikroskopet om fargekvaliteten for spesialfargene er vellykket.

## Ta ut etterbestillingsliste:


1. LVMS – Pat/Gen/DIT – Histologi – Etterbestilling.
2. Sortér i stigende nummerrekkefølge og gruppér på: Utførende lab - blokkstatus – arkiv.
3. Skriv ut liste fra etterbestillingsvinduet ved å ta bilde: «Windows-tast» + shift + s, eller åpne «Klipp og Tegn»-program. Få med kolonner til og med «Glasskommentar». Før på dato, klokkeslett og hvem som har tatt ut lista.
4. Sjekk om det er noen av prøvenumrene på KRH-listen som også finnes på KRH,KRI-listen eller på KRI-listen. Disse tar immunlab seg av, uavhengig av blokknummer, og kan sees bort fra.
5. Plukkliste:  
Huk av bestillinger i KRH-listen som ikke har «Farging: Mol.pat» eller som hører til immun (se punkt 3).  
Skriv ut ved å trykke knappen merket «Plukkliste».  
Denne brukes til å hente blokker fra arkiv.
6. Trykk «Markere hentet».
7. Legg blokkene med bestilling DDD til omstøp og sørg for at plastnettet blir fjernet og blokken blir støpt på nytt innen kl. 9.00.
8. Finn fram aktuelle kontrollsnitt.

## Snitting av etterbestillinger:

1. LVMS – Pat/Gen/DIT – Histologi – Snitting – les inn blokk
2. Scan inn blokk.
3. Aktuelle snitt kommer opp på SlideMate.  
Ved bestilt spesialfarge: Mat inn ett og ett glass med ktr. til aktuell analyse.
4. «Marker snittet»

DokumentID:D09882

Utarbeidet av: <b>Hege Wiksén</b>	Fagansvarlig: <b>Hege Wiksén</b>	Godkjent av: <b>Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen</b>	Verifisert av: <b>12.05.2023 - Linda Kvelland Skaara</b>
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Nedskjæringer og spesialfarger, Histologilaboratorium, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.2.1-6	Utarbeidet av: Hege Wiksén	Fagansvarlig: Hege Wiksén	Godkjent dato: 14.05.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 15.01

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Histologilaboratorium

## Referanse

[II.MSK.Pat.2.3.2.1-23 SymPathy Hurtigtaster, Histologisk laboratorium, Histologisk enhet.](#)

[Avd. for patologi, SSK \(ARKIVERT\)](#)

[II.MSK.Pat.2.3.2.1-5 Merking av objektglass, Enhet for histologi, Avd. for patologi, SSK](#)

[II.MSK.Pat.2.3.1.1-3 Makrouttak for bioingeniører, Makro, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK](#)

[II.MSK.Pat.2.3.2.1-3 Fordeling og kontrollering av snitt, Histologilab, Histologisk enhet, Avd. for patologi, SSK](#)

[II.MSK.Pat.2.3.2.1-15 Kontrollsnitt - HE og spesialfarger, Histologilaboratorium, Histologisk enhet, Avdeling for patologi, SSK](#)

[II.MSK.Pat.2.3.2.4.2-10 Congorød, Histologisk laboratorium, Histologisk enhet,](#)

[Avd. for patologi SSK](#)