

 SØRLANDET SYKEHUS		Klinikknivå		Retningslinje
Trykkvakt-anlegget				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.a-6		Godkjent dato: 29.01.2025	Gyldig til: 29.01.2027	Revisjon: 5.03

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere

NORMAL DRIFT:

Gassforsyning fra sentralgassanlegget. Ventilene V1, V2 og V3 skal stå åpne.

NB! Når ventilen er åpen vil skapdøren kunne lukkes som normalt. Hvis

Vi har Trykkvakt både på Intensiv og Postoperativ

VED SVIKT I OKSYGENTILFØRSEL


- Steng ventil merket **V1**, merket med **Oksygen**
- Kople hvit reservegasslange fra oksygenflaske til hurtigkobling **C1**
- Åpne ventil reservegassflaske
- Kontroller gassflaskens innholdsmanometer regelmessig. Bytt gassflasken når trykket viser ca 15-20 bar

VED SVIKT I LUFT-TILFØRSEL

- Steng ventil merket **V3**, merket med **Luft**
- Kople sort/hvit reservegasslange fra oksygenflaske til hurtigkobling **C3**
- Åpne ventil reservegassflaske
- Kontroller gassflaskens innholdsmanometer regelmessig. Bytt gassflasken når trykket viser ca 15-20 bar
- Kontakt teknisk avdeling: mob 91 68 51 08 (døgnvakt)

Utarbeidet av: Siv Aanestad	Fagansvarlig: Grethe Abusdal	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
---------------------------------------	--	--	--

 SØRLANDET SYKEHUS		Trykkvakt-anlegget				Side: 2
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.2.a-6		Utarbeidet av: Siv Aanestad	Fagansvarlig: Grethe Abusdal	Godkjent dato: 29.01.2025	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	Av: 2
Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere						Revisjon: 5.03

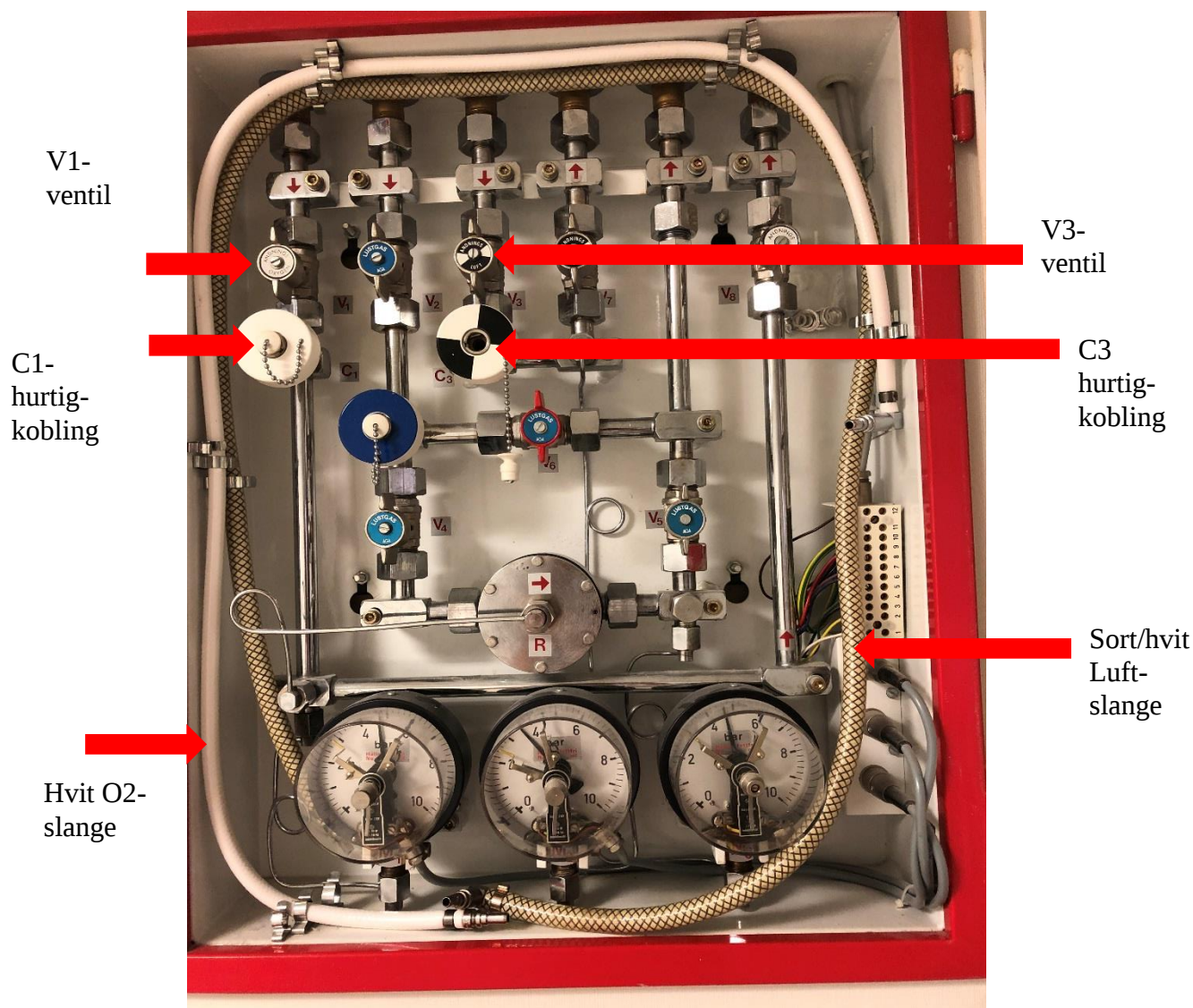

Kryssreferanser

Eksterne referanser