

PASIENTER OG BRUKERE

SJEKKLISTE FOR TRIAGEOMRÅDE

Utføres av dagvakt hver morgen. Sett kryss fortløpende etter utført sjekk og din signatur nederst

	MAN	TIRS	ONS	TOR	FRE	LØR	SØN
UKE :							
DATO :							
O2 - apparat testes							
4 stk - O2 kolber under brannteppe (minst 50 bar)							
Sug testes, 2 hvite, 2 grønne, 2 oransje, 2 svarte kateter til sug fylles på.							
4 brillekateter, 2 masker m/reservoar, 2 masker u/reservoar, svelgtuber (str 2-4)							
Philips'ene sees over og tørkes av, kabler og mansjett vaskes.							
Blodtryksmansjett i 3 størrelser i skuff.							
Fyll på SpO2 utsyr i skuff. Øresensor, finger baby, finger barn, engangs pulsoks.barn							
Standardtralle fylles på og sprites over.							
Full risikoboks byttes ved behov (husk merking).							
Ringesnor SKAL sprites hver morgen							
Stetoskop, otoskop og øretermometer - rengjøres							
Ventilasjonsbag m/maske: 1 voksen							
Datamaskin tørkes med tørr klut, restarter daglig – sprite tastatur og mus							
EKG apparatene rengjøres, legg barberhøvler i skuffen							
Sjekk innhold + vaske utstyr i trillbare monitorer							
Sjekk at det er hemofec og Cobas Liat tester i kjøleskap ved akr 3 (heng ut brikker)							
SYRE-BASEROMMET generell rydding og vasking samt tømme søppel.							
Urin stix instr. rengjøres daglig. Matingsbord urin stix i Vircon. Se bruksanvisning.							
Skifte papirunderlag, sprite benk v/ urinstixinstrumenter							
Kontrollsjekk blodsukkerapparatet – sett til ladning – 1 eske kyvetter ved apparatet							
Sjekk innhold til ketonapparat. Ring 3444 dersom det mangler teststrimler							
Kontroll Ketoner apparatet Hvit skal sjekkes hver uke, og blå/gul sjekkes hver mnd. Se eget skjema over stixapp							
Sjekk bærer, rengjør							
Tøm søppel, rydd før vaktskifte dag/aftern og aftern/natt							
Alle gardinene i triage/sal skal skiftes den første mandagen i hver måned. Hver gardin skal merkes med dato etter bytte.							
Signatur							

Dokument ID:
II.SOK.MEK.SSK.2.c-15

Fagansvarlig:
Chris Peter Grasaas-Albrecht

Godkjent av:
Chris Peter Grasaas-Albrecht

Godkjent dato:
12.03.2025

Revisjon:
7.00