

CADD-LEGACY SMERTEPUMPE.

Side 1 av 2

BRUKERVEILEDNING FOR SYKEPLEIERE - INTENSIV

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.2.c-2

Gruppe:

I

Godkjent dato:

29.07.2024

Gyldig til:

29.07.2026

Revisjon:

2.05

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Utstyr- Arbeidsrutine

Klargjøring av pumpen:

Sett i batteriene.

Pumpen starter nå av seg selv og gjør en selvtest.

Koble settet til posen.

Fyll gjerne settet før det settes i pumpen.

Bruk pumpenøkkelen til å låse opp pumpen slik at settet kan settes i.

Lås med nøkkel.

Programmering av pumpen:

Trykk **Lås** Låsenivå LN0 eller LN1 vises i displayet.

Bruk piltaster opp/ned for å få fram L0 hvis ikke det er det som står.

Trykk **Bekreft** Kode 0 vises i displayet.

Bruk piltaster opp for å stille inn 63 (hemmelig kode)

Trykk **Bekreft** Trykk **Neste** Kasettvolum vises.

Bruk piltaster for å endre volum. Pumpen skal stå på 540 ml og vi bruker 550 ml

Trykk **Bekreft**

Trykk **Neste** til du kommer til Kont.hastighet. Sett 15 ml/t om ikke annet er bestemt fra lege. Nå kan denne dosen ikke overskrides i låsenivå L1

Trykk **Bekreft** Trykk **Neste** til du kommer til Totalt infundert

Trykk **Bekreft/Slett** for å nullstille. Trykk **Neste** til du kommer til Stoppet

Trykk **Lås** Sett pumpen i L1 ved å bruke piltasten opp

Trykk **Bekreft**. O vises nå i displayet.

Bruk piltastene for å sette kode 63 (hemmelig kode)

Trykk **Bekreft** Trykk **Neste** til Kont.hastighet kommer opp

Still inn startdose ml/t ved å bruke piltastene. Trykk **Bekreft**

Trykk **Start/Stop** og hold knappen inne til tre streker forsvinner

Bolusdose:

Bare la pumpen være i gang. Trykk **Neste** til Bolus vises. Trykk **Lås**. Sett kode 997 ved å bruke piltastene ned. Trekk **Bekreft**. Sett bolusmengde ved å bruke piltast. Trykk **Bekreft**

Utarbeidet av:

**Marianne Raae, Oddveig
Reiersdal**

Først utgitt:

23.06.2008

Fagansvarlig:

Anne Pettersen

Godkjent av:

Grete Kruger Erdvik

 SØRLANDET SYKEHU		Cadd-Legacy Smertepumpe. Brukerveiledning for sykepleiere - intensiv			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.2.c-2	Utarbeidet av: Marianne Raae, Oddveig Reiersdal	Fagansvarlig: Anne Pettersen	Godkjent dato: 29.07.2024	Godkjent av: Grete Kruger Erdvik	Revisjon: 2.05

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Utstyr- Arbeidsrutine

Endre infusjonshastighet (ml/t):

Trykk **Start/stopp**, hold knappen inne til tre streker kommer fram i displayet

Trykk **Neste** til Kont. Hastighet kommer opp

Endre ml/t ved å trykke på piltastene

Trykk **Bekreft**

Start pumpen igjen ved å holde inne **Start/Stop** knappen til de tre strekene forsvinner

Skifte av infusjonspose og sett (spesialsett – fåes på sterilsentralen, evt intensiv):

Stopp pumpen ved å trykke **Start/stopp**, hold knappen inne til tre streker kommer fram i displayet

Slå av pumpen ved å trykke **På/Av** knappen inntil tre prikker vises

Lukk slangen med klemmen

Bruk spesial pumpe-nøkkel til å låse opp pumpen slik at settet kan fjernes

Koble nytt sett til posen. Fyll gjerne settet manuelt.

Sett inn settet i pumpen. Lås med nøkkel. Skift gjerne epiduralfilter også ved poseskift (kan ligge 7 dager)

Slå på pumpen ved å holde inne **På/Av** knappen til de tre strekene forsvinner

Trykk neste til den kommer til volum og trykk **Bekreft**

Og pumpen skal automatisk stilles inn på 540ml. Sjekk infusjonshastigheten og koble til pasient

NB! Streng aseptisk teknikk

For å nullstille pumpen:

Stopp pumpen ved å trykke **Start/stopp** (hold ned til tre streker vises)

Trykk **Neste** til du kommer til Totalt infundert volum

Trykk **Bekreft/slett**

Trykk **Neste** til du kommer til Stoppet

Starte pumpen igjen

Sørg for at pumpen er nullstilt før oppstart (og evt kl. 07.00 hver morgen).

Og før pumpen slås av når behandlingen seponeres.

Se også egen prosedyre for overvåking av pasient med epidural smertebehandling

Kryssreferanser

Eksterne referanser