


## VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasientbehandling /Leiring

### KNE / ALBU - INSTRUKS

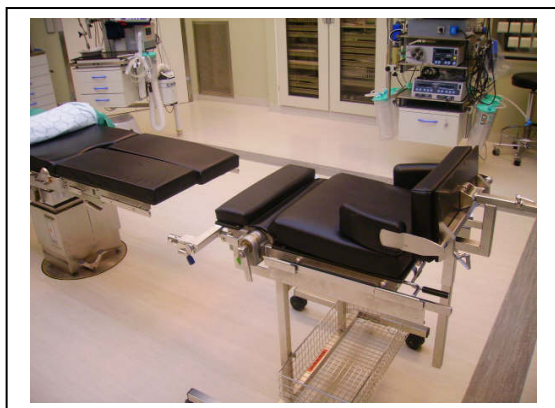

**Utstyr til leiring kjøres inn på stue før pasienten tas inn.**

**Universalbord skal stå på sokkel**

**Pasienten kjøres inn på stue på annet bord ( strekkbordet**



**Bordene fjernes på begge sider**



**Kne / Albu ansats kjøres inn til universalbordet**

## VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA



**OBS !-**  
**Løsne låsemekanisme før man kjører ansatsen helt inn til universalbordet**



**Kjør bordet opp , og fjerne tralle**



**Fjerne nederste støtte (skal på igjen senere i prosessen )**




**Legge brettet gele pute på plass hvor pasienten skal ha knærne**


**VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA**



Når pasienten er lagt i narkose, så flyttes pasienten over på bordet . **OBS** stilling for knærne !

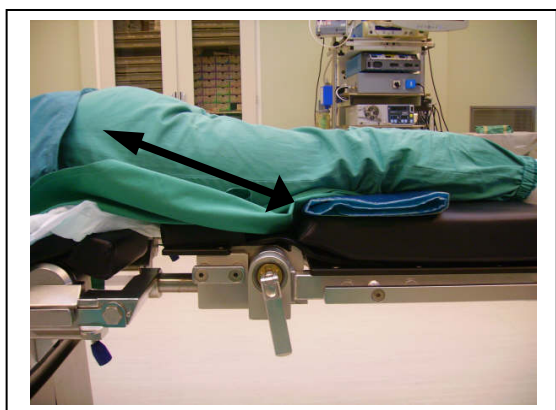

**VIKTIG !!**  
Obs avstand mellom trochanter og kneleddet – Bordet må justeres til riktig avstand

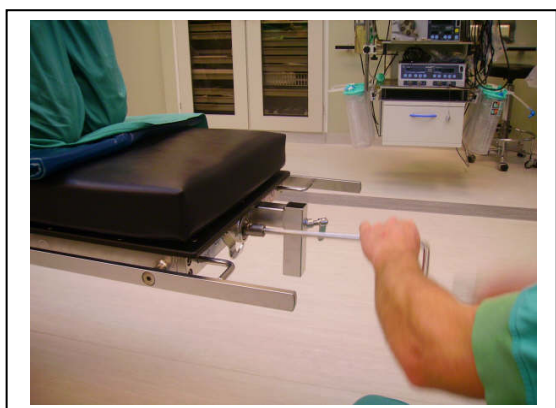

Justere avstand ved å forlenge / forkorte avstanden ved bruk av skru redskap nederste



Løsne låse mekanisme på begge sider av bordet.




**VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA**

**Neste fasene er viktig iht  
pasient sikkerhet og skjer i  
forholdsvis rask rekkefølge**

**Dra ut begge spak nederst på  
bordet**



**Støtte pasientens føtter så de  
ikke glir nedover eller til  
sidene**

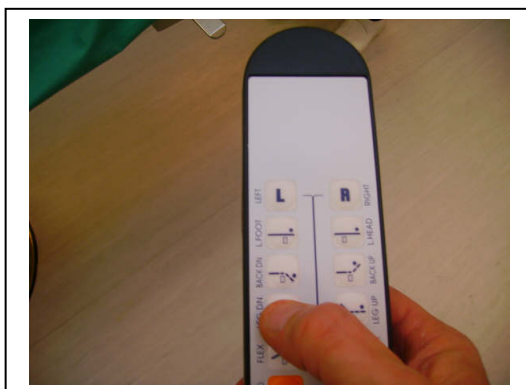

**Når de 2 forrige aksjonene er  
utført,  
så kjør "LEG DOWN" med  
fjernkontrollen**



**Hold igjen og støtte  
pasientens vekt mens "LEG  
DOWN" fasen utføres**



## VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA


**Låse på begge sider**



**Pasientens stilling før neste fasen**  
**OBS – I virkelighet må man støtte pasienten til en hver tid**



**Monter Posterior / Lateral støtte på bordet**

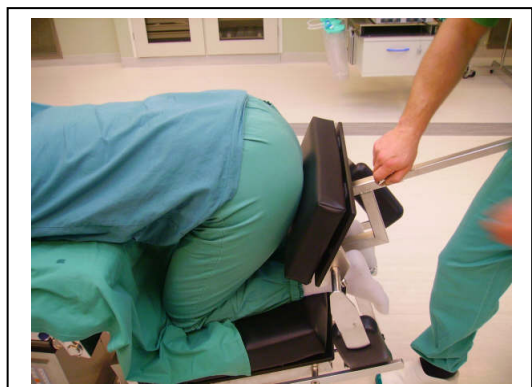

**Når Posterior / Lateral støtten er på plass så kan pasienten flyttes nedover på bordet så abdomen er utenfor bordkanten**

**VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA**

**Tilpasse de lateral støttene , i tillegg brukes side støtter for a sikre pasienten mot lateral bevegelser**

**Bruk denne typen pute til polstring av ekstra sidestøtter**



**Pasientens stilling ved ferdig leiering-**

**Obs bordet må fin justeres hode opp / ned evt når operatoren er på plass**



**Pasienten i stabil leie**


**Og klar for operatøren til å bestemme operasjonsnivå og stille inn microscop**

**Etter avsluttet inngrep så kjøres prosessen i revers**

## VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA



**Fjerne side støttene**

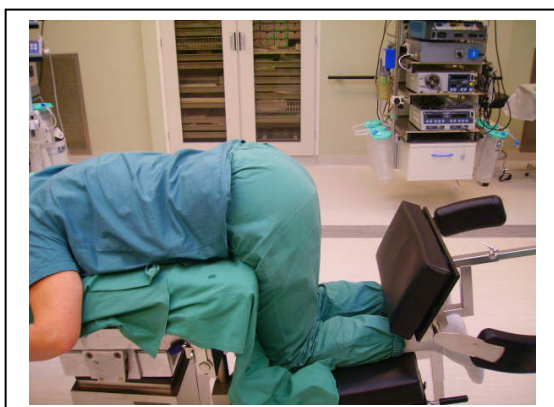

**Pasienten flyttes oppover så  
abdomen ligger på bordet**



**Posterior / Lateral støtte  
ansats fjernes**




**Låsemekanisme på begge  
sider løsnes**

**VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA**




**Som før, dras ut begge spak mens man støtter pasientens føtter**

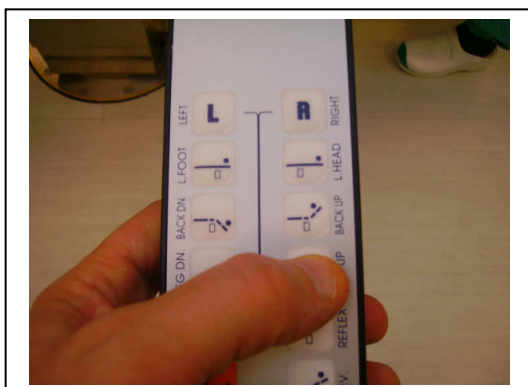

**Når spakene er dratt ut og pasienten er trygg støttet så kjører man "LEG UP" på fjern kontrollen**



**Hold igjen og støtte pasientens vekt mens "LEG UP" fasen utføres**

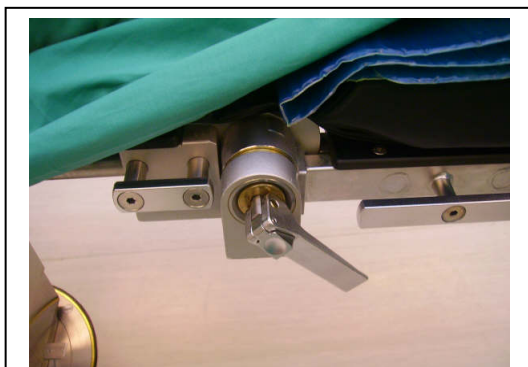


**Låse på begge sider-**


**Pasienten er nå i trygg mage leie og kan flyttes over på et annet bord i rygg leie hvis ønskelig**

## VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA


### Demontering av kne / albu ansats

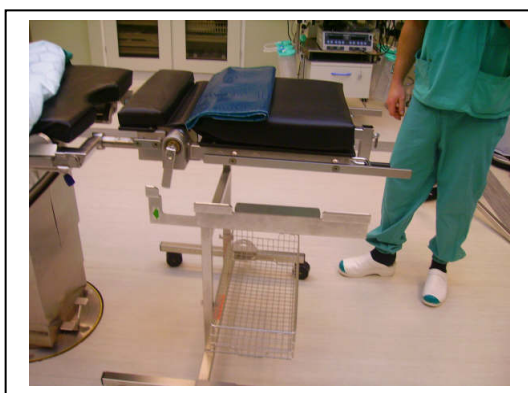

**Kjøre bordet opp og plassere tralle under –  
Obs er viktig med ganske nøyaktig plassering**

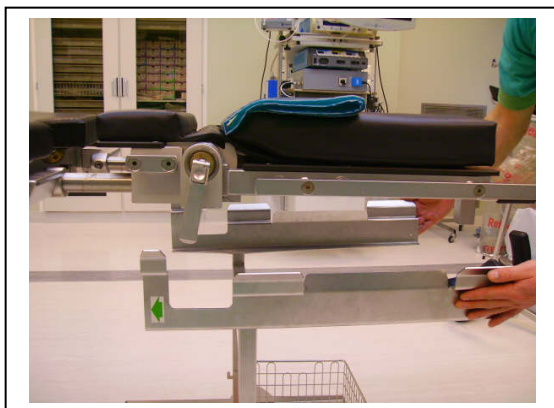

**Riktig tralle plassering**

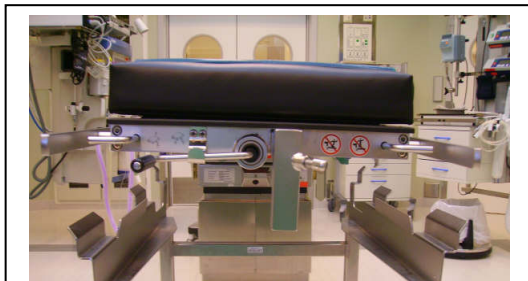

## VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA

**Riktig plassering sett bakfra**



**Kjør bordet ned –**

**OBS ansatsen skal så vidt sitte på tralle ikke kjøre for langt ned**




**Ansatsen i riktig høyde iht bordet. Klar for videre demontering**



**Lås opp på begge sider som ved montering**

## VEILEDNING KNE/ALBUELEIE - OPERASJON - SSA

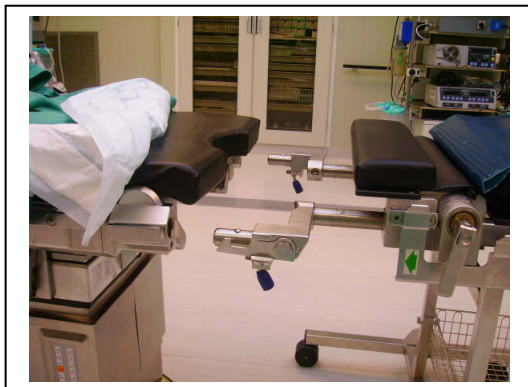

**Kjøre tralle ut fra bordet  
komplett med ansats**



**Montere bordene på  
vanlig måte**



**TA TA !! FERDIG 😊**