

 SØRLANDET SYKEHUS				Medisinsk serviceklinikk		Generelt dokument	
Forsendelse av preparat til nevropatologisk undersøkelse. Avd. for patologi SSK						Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.5-8			Godkjent dato: 21.11.2024	Gyldig til: 21.11.2026	Dato endret: 21.11.2024	Revisjon: 12.00	

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Obduksjon

DISTRIBUSJONSLISTE: EK og tarifolder og perm Obd.seksjon

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Store endringer, leses som ny

Omfang

Denne prosedyre gjelder for obduksjonspreparanter og bioingeniører sertifisert for obduksjon ved Avdeling for patologi.

Hensikt

Beskrive hvordan forsendelse av hjerner til nevropatologisk undersøkelse ved St. Olavs Hospital skal gjennomføres.

Handling

Etter beskjed fra patolog, sendes fikserte hjerner til nevropatologisk undersøkelse ved St. Olavs Hospital:

- Hjernen fikseres i formalin i minimum fire uker
- Legg hjerne i dobbel formalintett zip-lock pose (blå zip-lock). Merkes med LVMS-etikett
- Legges i isoporkasse, opptil fire hjerner kan sendes i samme kasse. Legg absorberende klut i bunnen, og cellostøff på toppen.
- Legg følgebrevet for hver hjerne og arbeidskopi fra LVMS (gjøres av ansvarlig LIS-lege) i egen plastpose. Kassen pakkes inn i gråpapir med rikelig tape rundt. Merkes med mottakeradresse:

St. Olavs Hospital
Avd. for pat. Laboratoriesenteret 4 etg.
Erling Skjalgssonsgt. 1
7030 Trondheim

For avsenderadresse benytt stempel med avdelingens adresse.

- Registrer sendt pakke i LVMS:
 - Inn- og utlån
 - Type: OneWayPackage
 - Avsender: SS-PAT-KR
 - Mottaker: STOLAV-PAT
 - Innhold; søk opp obduksjonsnummer, huk av SampleItem (nederst på lista) → Legg til
 - Kommentar: Hjerne sendes til nevropatologisk undersøkelse ved St. Olavs Hospital
 - Trykk Send
- Fyll ut [Skjema for hjerner sendt til St. Olavs Hospital. Avd. for patologi SSK](#), i perm på hylla på obduksjonskontor.

Pakken leveres i kjelleren og skal sendes med Posten.

DokumentID:D23911			
Utarbeidet av: Fagbioingeniør Stine Wathne	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Stine Wathne	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 21.11.2024 - Linda Kvelland Skaara

 SØRLANDET SYKEHUS	Forsendelse av preparat til nevropatologisk undersøkelse. Avd. for patologi SSK				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.5-8	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Stine Wathne	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Stine Wathne	Godkjent dato: 21.11.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 12.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Obduksjon

Kryssreferanser

[II.MSK.Pat.2.5-19](#)

[Skjema for hjerner sendt til St. Olavs Hospital. Avd. for patologi SSK](#)

Eksterne referanser