

 SØRLANDET SYKEHUS		Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service		Generelt dokument
Urinalyser på Clinitek Status - PNA prosedyre, Medbio SSK				Side 1 av 3
Dokumentplassering: II.DKS.MBio.6.3.9.2-4	Godkjent dato: 21.10.2024	Gyldig til: 21.10.2026	Dato endret: 28.10.2025	Revisjon: 10.01

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Kjernevirksomhet/Pre- og postanalytisk enhet/PNA
DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Tarifold PNA benk, div avdelinger
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: satt i tabell, lagt til distribusjonsliste

HENSIKT
Prosedyren skal sikre riktig analysering av urinstrimmeltest på Clinitek Status

OMFANG
Prosedyren gjelder for personell ved husets avdelinger og poliklinikker som er opplært i bruk av Clinitek Status

UTFØRELSE

Prøvemateriale	• Frisklatt, romtemperert urin • Morgenurin anbefales, men spot urin kan også benyttes
Teststrimmel	Multistix 7 • Oppbevaring: i romtemperatur, med lokket påskrudd • Holdbar: til påført utløpsdato
	• Bland urinprøven godt før analysering for å sikre riktig resultat. Ved henstand vil celler og bakterier kunne synke til bunns og gi feil avlesning • Dersom prøven ikke kan analyseres straks bør den oppbevares kjølig, og analyseres innen 4 timer etter prøvetaking • Dersom urinprøven har unormal farge (eks. rød, sort eller brun), må urinprøven leveres MedBio for vurdering • Merk uringlasset (ikke korken) tilstrekkelig med pasientens navn og 11-sifret personnummer
Analysering	• Skjermen berøres ved bruk av finger • Velg Strip Test • Enter new operator name – benytt strekkodeleser og scann ditt brukernavn. Evt. tast inn manuelt ved hjelp av knappen som er merket ABC • Enter new patient – scann pasientens 11-sifret personnummer. For å sikre svaroverføring til DIPS er det viktig at alle 11 siffer i pasientens personnummer registreres • Enter new lot/use last lot – Hvis loten på boksen er lik fra forrige lot, trykk use last lot. Hvis det er ny lot, trykk Enter new lot og scann boksen • Prepare test • Ta ut en strimmel (Multistix 7), sku på lokket igjen • Berør feltet START, du har nå 8 sekunder på deg til å gjøre punktene under • Dypp strimmelen i en godt blandet, romtemperert urinprøve • Dra strimmelen forsiktig langs kanten på uringlasset for å fjerne overskuddsurin • Sett så strimmelen, med kanten ned på et absorberende papir • Plasser strimmelen i analysesporet på matebordet i instrumentet • Etter analysering: Kast teststrimmelen i vanlig avfall og tørk av analysesporet med en fuktig tupfer Dersom feil ID benyttes må MedBio kontaktes umiddelbart slik at feil svar slettes fra DIPS.

DokumentID:D25750			
Utarbeidet av: Fagbioingeniør Hege østerhus	Fagansvarlig: Enhetsleder Malene Lohne	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Verifisert av: 18.10.2024 - Kvalitetskoordinator Ingunn Gåsvær

 SØRLANDET SYKEHUS	Urinalyser på Clinitek Status - PNA prosedyre, Medbio SSK				Side: 2 Av: 3
Dokumentplassering: II.DKS.MBio.6.3.9.2-4	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Hege østerhus	Fagansvarlig: Enhetsleder Malene Lohne	Godkjent dato: 21.10.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Revisjon: 10.01

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Kjernevirksomhet/Pre- og postanalytisk enhet/PNA

Feilkilder	• For kald eller varm urinprøve • For gammel urinprøve • Ikke blandet eller dårlig blandet urinprøve • Sterk egenfarge på prøven • Medikamentbruk – se pakningsvedlegg for aktuelt medikament for utvidet informasjon • Instrumentelle forhold som feil bruk av instrumentet, feil oppbevart stix, feilregistrering av pasientinfo
Andre viktige forhold	• Matebordet må ikke skyves inn i instrumentet – instrumentet trekker automatisk inn matebordet når det er gått 8 sekunder etter at START er trykket. Dersom matebordet skyves inn, vil det kunne sette seg fast og apparatet må til service • Online forbindelse mellom apparat og DIPS vises ved en datamaskin oppe i venstre hjørne. Dersom det er kryss over denne betyr det at online forbindelse mangler. Sjekk at nettverkskabel er satt ordentlig i, kontakt eventuelt Medisinsk biokjemi
Bytte av papir	• Åpne begge lokkene bak på Clinitek Status og følg anvisningen for papirbytte • Fjern noen runder av papirrullen slik at alle rester av lim forsvinner • Klipp enden som en spiss, da er det enklere å få den riktig på plass i skriveren • Legg papirrullen riktig vei, med «blank» side vendt opp. Dersom rullen legges feil vei vil det ikke komme skrift på papiret • Bruk kun papirrull som er egnet for Clinitek Status
Vedlikehold	Superbruker på din avdeling/poliklinikk har ansvar for å lage et system for vedlikehold. Oppfordrer til bruk av skjema for enklere oversikt: Vedlikeholdsskjema Clinitek Status, Medbio SSK
Daglig	• Løft ut testholderen fra matebordet og skyll under rennende vann, tørk godt
Ukentlig	• Matebordet med testholder trekkes forsiktig ut av instrumentet og plasseres i virkon i 10 minutter. OBS: Delen med den hvite kalibreringsstripa må ikke komme i kontakt med virkon • Delene skylles så i vann, og tørkes godt. OBS: Kalibreringsstripa må ikke komme i kontakt med vann. Dersom dette skjer må det tørkes vekk med en ren bomullspinne. Ved synlig søl, hakk og lignende på kalibreringsstripa – kontakt Medisinsk biokjemi • Slå av instrumentet og vask det utvendig med en fuktig klut eventuelt med såpevann • Dersom skjermen er synlig tilgriset så kan den vaskes ved å bruke et papirhåndkle fuktet med virkon. La papirhåndkle ligge på i 10 minutter for optimal effekt. Tørk deretter av med rent vann • Barkodeleseren desinfiseres ved bruk av overflatedesinfeksjon
Forbruksvarer	bestillingsnummer: • Papir: 10003393 • Multistix 7: 10175295
Ved problemer	Dagtid: Tlf. 3458 Vakt/utom ordinær arbeidstid: Tlf. 3444

Kryssreferanser: [II.DKS.MBio.6.3.9.2-9 Vedlikeholdsskjema Clinitek Status, Medbio SSK](#)

 SØRLANDET SYKEHUS	Urinanalyser på Clinitek Status - PNA prosedyre, Medbio SSK				Side: 3 Av: 3
Dokumentplassering: II.DKS.MBio.6.3.9.2-4	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Hege østerhus	Fagansvarlig: Enhetsleder Malene Lohne	Godkjent dato: 21.10.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Revisjon: 10.01

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Kjernevirksomhet/Pre- og postanalytisk enhet/PNA

Eksterne referanser: [Brukerhåndbok Clinitek Status + Analyser](#)