

		Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service		Instruks
Ultralyd RAD-SSA: Rutiner Siemens Acuson S2000				Side 1 av 3
Dokument ID: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.11-2		Godkjent dato: 04.08.2026	Gyldig til: 04.08.2028	Revisjon: 1.01


DAGLIGE RUTINER:

- **SKRU AV APPARATET:**

- Apparatet skal skrus av én gang i døgnet. Dette gjøres av kveldsvaktene
- Trykk på knappen øverst til venstre på apparatet
- Skjermbildet kommer opp
- Velg *shut down*

- **SKRU PÅ APPARATET:**


- Nattevaktene skruer apparatet på så det er klart til dagvaktene kommer
- Trykk på knappen øverst til venstre på apparatet
- Det tar noen minutter for apparatet å kjøre seg opp, så det bør skrus på før pasienten ligger på bordet!
- Ved kjøring av apparatet til stue skal det stå i *standby* posisjon
 - Trykk på knappen øverst til venstre på apparatet
 - Skjermbildet i bilde 2 kommer opp
 - Velg *Standby*

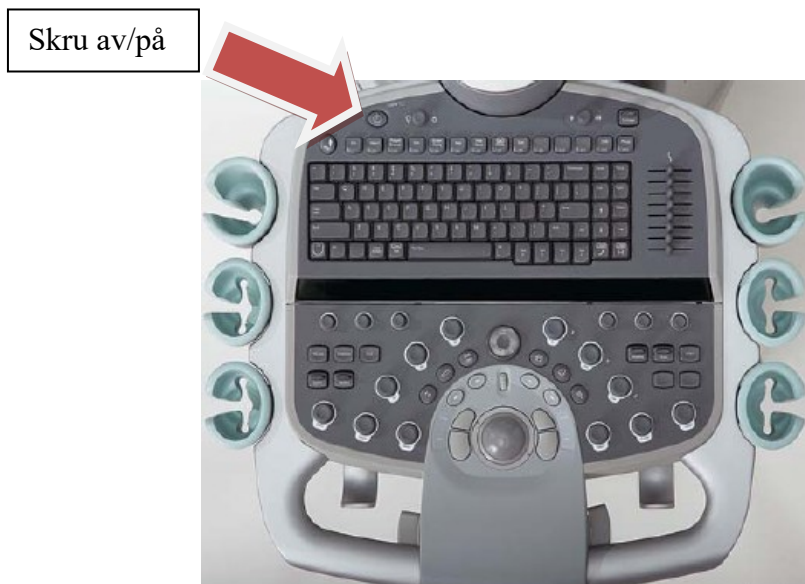

Bilde 1: Skrut av/ på

 SØRLANDET SYKEHUS	Ultralyd RAD-SSA: Rutiner Siemens Acuson S2000				Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.11-2	Utarbeidet av: Darlene Sandvik	Fagansvarlig: Darlene Sandvik	Godkjent dato: 04.08.2026	Godkjent av: Morten Opheim	Revisjon: 1.01

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

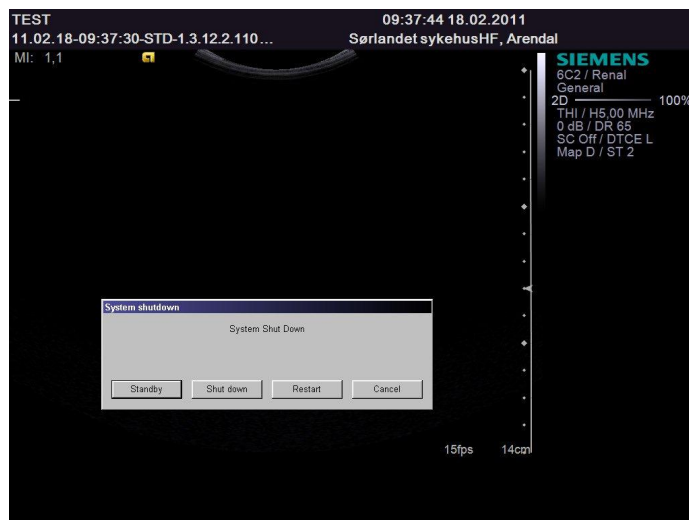

Bilde 2: Standby og shut down

STØVFILTER:

- Støvfilteret blir støvsugd ved periodisk vedlikehold, ellers ved behov. Kontakt medisinsk teknisk avdeling.

RENGJØRING:

- Tastaturet vaskes med en lett fuktet klut med rent vann eller mildt vaskemiddel. Apparatet må være skrudd av!
- Desinfisering av transducere:
 - Bruk desinfeksjonstørk (SaniSwiss)
 - Ikke sprit!
 - NB! Virkon kan IKKE brukes på alle transducere.

Transducer:	Kan desinfiseres med Virkon:
4C1	NEI
4V1	NEI
6C2	NEI
9L4	JA
10V4	JA
14L5	JA

 SØRLANDET SYKEHUS	Ultralyd RAD-SSA: Rutiner Siemens Acuson S2000				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.11-2	Utarbeidet av: Darlene Sandvik	Fagansvarlig: Darlene Sandvik	Godkjent dato: 04.08.2026	Godkjent av: Morten Opheim	Revisjon: 1.01

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring