

Tømme avfallsbeholder på ThinPrep5000, Cytologisk og histologisk diagnostikk, Avd. for patologi, SSK

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.MSK.Pat.2.2.1-23

Godkjent dato:

20.08.2024

Gyldig til:

20.08.2026

Dato endret:

20.08.2024

Revisjon:

5.00

Medisinsk serviceklinikk\Avd for patologi SSK\Pasienter og brukere\Cytologisk og histologisk diagnostikk\Cytologisk laboratorium

DISTRIBUSJONSliste: EK, skuff på cytologisk laboratorium.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret arbeidssted

HENSIKT

Prosedyren beskriver hvordan beholderen for avfall skal tømmes.

OMFANG

Denne prosedyren gjelder for bioingeniører, Cytologisk og histologisk diagnostikk.

UTFØRELSE

Avfallsbeholderen skal tømmes når nivået når den røde streken, evt når det kommer melding om det på skjermen.

Trykk på **Administrative alternativer** i hovedmenyen.Velg **Tøm væskeavfall**.Trykk **Fortsett** for å utligne trykket i væskebeholderen.

Tøm flasken i beholder for brukt sprit og xylen. Skru på lokket igjen.

Trykk **Fortsett** for lekkasjetest.Når lekkasjetest er ferdig, trykk **Fortsett**.Velg **Ferdig** i hovedmeny.**Kryssreferanser:**[II.MSK.Pat.2.2.1-8](#)[Laboratorierenhold, Enhet for cytologi, Avd. for patologi SSK](#)**Eksterne referanser:**

DokumentID:D31043

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Grete von der Ohe	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 14.08.2024 - Linda Kvelland Skaara
--	------------------------------------	---	--

Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.2.1-23	Utarbeidet av: Fagbioingeniør Grete von der Ohe	Fagansvarlig: Grete von der Ohe	Godkjent dato: 20.08.2024	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Revisjon: 5.00
--	--	------------------------------------	------------------------------	---	-------------------

Medisinsk serviceklinikk\Avd for patologi SSK\Pasienter og brukere\Cytologisk og histologisk diagnostikk\Cytologisk laboratorium