


Cough Assist E70. Innstilling - vise og endre. Fysioterapi SEF
SSHFDokument ID:
II.DKS.SEF.7.3-2Godkjent dato:
13.05.2025Gyldig til:
13.05.2027Revisjon:
2.02

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Sosionom, ergoterapi, fysioterapi/Administrative rutiner/Utstyr

Ansvar: Denne retningslinjen er til bruk for fysioterapeuter ved SSHF som er sertifisert til å starte opp behandling med Cough Assist E70.

Handling: For å lage et nytt program eller endre på innstillingene i et program må symbol for åpen hengelås  vises i øvre høyre hjørne. Du har da "Full menytilgang". Ved "Begrenset menytilgang" vises ikke hengelåsen og du har bare anledning til å velge mellom forhåndsinnstilte program. Du kan likevel få anledning til å få "Full menytilgang". Dette gjøres ved å holde inne nederste menyknapp samtidig som manuellbryter skyves mot høyre (+) og holdes til symbolet for åpen hengelås vises. Maskinen vil automatisk gå tilbake til "Begrenset menytilgang" etter 5 minutter uten aktivitet eller at maskinen slås av og på. For permanent å endre innstillingen for menytilgang må du inn i Meny og Alternativer og der gjøre ønskede valg.

Etter den siste oppdateringen kan maskinen låses opp uten å være påslått. Du åpner den ved å holde inne nederste menyknapp samtidig som manuellbryter skyves mot høyre (+) og holdes til symbolet for åpen hengelås vises. Maskinen lager da ingen lyd mens du stiller den inn.

1. Trykk INNSTILLINGER
2. Trykk NAVIGER pil opp eller pil ned for systematisk å komme til de forskjellige valgmulighetene. Valgmulighetene er:
 - Forhåndsinnstilling. Velg om du vil kalle programmet 1, 2 eller 3. Antall mulige program valg kan begrenses til bare 1 eller 2 program.
 - Modus. Auto eller Manuell.
 - Cough-Trak. AV eller PÅ. Ved PÅ trigger pasienten inspirasjonen.
 - Inspirasjonstrykk. Velg trykk i cm H₂O.
 - Inspirasjonsflow. Velg Høy, Medium eller Lav.
 - Inspirasjonstid. Kun når Auto modus er valgt. Velg lengde i sekunder.
 - Ekspirasjonstrykk. Velg trykk i cm H₂O.
 - Ekspirasjonstid. Kun når Auto modus er valgt. Velg lengde i sekunder.
 - Pausetid. Kun når Auto modus er valgt eller Cough-Trak er AV. Velg lengde i sekunder.
 - Oscillering. Velg AV, Begge, Inspirasjon eller Ekspirasjon.
 - Frekvens. Kun når Oscillering er valgt. Velg frekvens i Hz dvs. antall oscilleringer i sekundet.
 - Amplitude. Kun når Oscillering er valgt. Velg trykk mengden som oscilleringen skal utgjøre. Det valgte trykket svinger +/- i forhold til de allerede valgte trykkene. Eks. Inspirasjonstrykk valgt til 40 cm H₂O og oscillering valgt til 10 cm H₂O gir et trykk som svinger mellom 30 og 50 cm H₂O.
 - Avansert modus. Modusen gir mulighet til å stille inn dype innpust direkte etterfulgt av en forhåndsbestemt serie med hostesykluser. Du definerer da en rekke variabler som beskrevet over.
3. Endre en innstilling ved å trykke ENDRE, deretter REDIGER pil opp eller ned til ønsket verdi/valgalternativ, deretter trykk OK.
4. Når alle endringene er ferdig, trykk FULLFØR.
5. Du har nå laget et program som er forhåndsinnstilt og klar til bruk.

Utarbeidet av:


Marianne Smith, Anne Kristine Brekka, Aslaug Stenvik Andersen

Fagansvarlig:

Siren Askevoold Vaaler, Camilla Moland

Godkjent av:

Per Kristian Andersen

 SØRLANDET SYKEHUS	Cough Assist E70. Innstilling - vise og endre. Fysioterapi SEF SSHF				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.DKS.SEF.7.3-2	Utarbeidet av: Marianne Smith, Anne Kristine Brekka, Aslaug Stenvik Andersen	Fagansvarlig: Siren Askevold Vaaler, Camilla Moland	Godkjent dato: 13.05.2025	Godkjent av: Per Kristian Andersen	Revisjon: 2.02

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Sosionom, ergoterapi, fysioterapi/Administrative rutiner/Utstyr

For mer utfyllende informasjon vises til brukerhåndboken for Cough Assist E70.

Kryssreferanser

[II.DKS.SEF.2.2.1-19](#)

[Cough Assist E70. Praktisk bruk, renhold og vedlikehold. Hjemme. Fysioterapi SEF SSHF](#)

Eksterne referanser