

Hang-up ved det trådløse mobile apparatet Shimadzu - Rad.avd.SSA

Side 1 av 2

Dokumentplassering:
II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.12-6

Godkjent dato:
17.06.2026

Gyldig til:
17.06.2028

Dato endret:
17.06.2026

Revisjon:
1.11

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring
DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: endring av mal

Hang-up på det trådløse mobilapparatet Shimadzu. Hva kan gjøres for å komme ut av det? To måter.

Måte 1: Skal kun brukes i nødsfall som ved Emergency

1. Vipp ned hovedbryter. Se fig. 1 og 2
2. Vipp den opp igjen.
3. Slå på nøkkelbryter og trykk påknapp til PC ved displayet (blå).

Fig.1


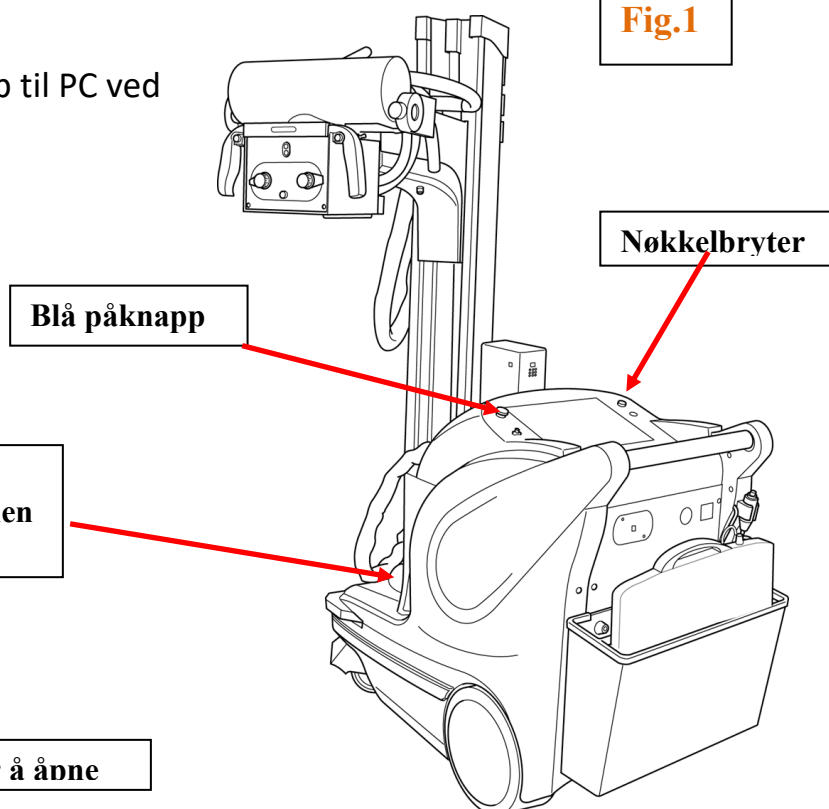


Fig.2

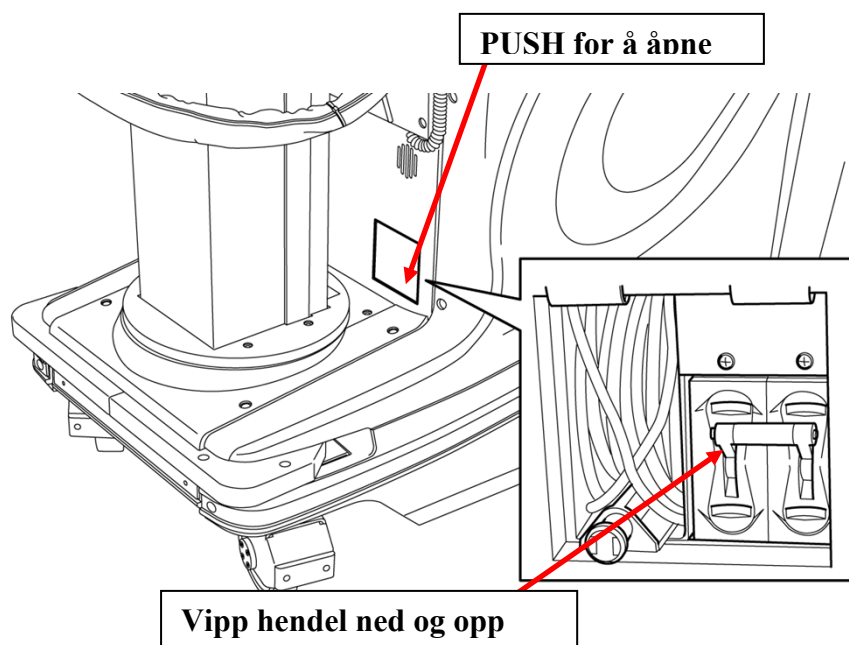

Trykk der hvor det står PUSH på lokket. Åpn det og vipp hendelen ned for å slå av. For å slå på igjen: Vipp hendelen opp. Husk også å slå på nøkkelbryter og PC-enheten (blå knapp). Det tar ca. 2. min

DokumentID:D33372

Utarbeidet av:
Vigdis Rasmussen

Fagansvarlig:
Vigdis Rasmussen

Godkjent av:
Avd. leder Inger Wenche Nilsen

Verifisert av:
□

 SØRLANDET SYKEHUS	Hang-up ved det trådløse mobile apparatet Shimadzu - Rad.avd.SSA				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.12-6	Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Vigdis Rasmussen	Godkjent dato: 17.06.2026	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 1.11


Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

Måte 2:

Skal brukes i alle andre tilfeller ved hang-up. Dette sparer PC'en.

1. Hent tastatur, mus og HUB på fagradiografkontoret. Ligger i øverste hylle til høyre når du kommer inn. Det ligger ferdig koblet. Hvis ikke sett både tastatur og mus i HUB'en.
2. Sett nettkontakten fra HUB i nettpunktet på apparatet. Fig.3
3. Trykk Ctrl+Alt+Del og før musa til avsluttknappen. Nederst til høyre på displayet. Trykk avslutt som på en vanlig PC.
4. Pc- slår seg av.
5. Slå også av nøkkelbryteren.
6. Vent 1 min. Slå alt på igjen.

Fig.3

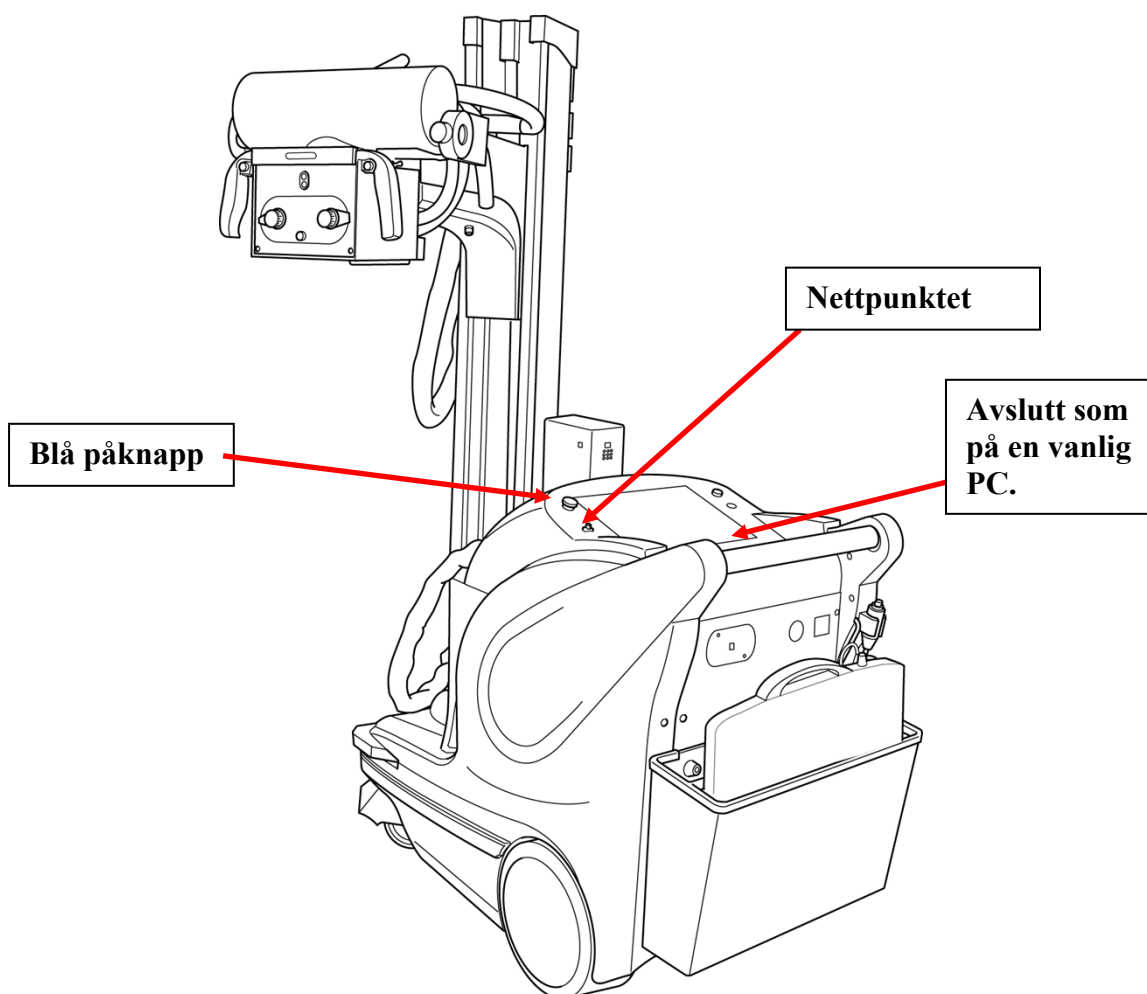

Referanser: Bruksanvisning fra Decotron – Shimadzu. Ligger i overskapet på E4.