

		Medisinsk serviceklinikk			Generelt dokument
Protokolloppsett og endring på BenchMark Ultra. Immunologi. Histologisk enhet. Avd.for patologi SSK.				Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.3.3.1-12		Godkjent dato: 11.04.2024	Gyldig til: 11.04.2026	Dato endret: 11.04.2024	Revisjon: 2.01

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Histologisk enhet/Immunologisk laboratorium

DISTRIBUSJONSliste: EK.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 11.04.2026 uten endringer i dokumentet.

HENSIKT

Hvordan sette opp protokoller og endre på disse.

OMFANG

Denne prosedyren gjelder for bioingeniører ved immunologisk lab, hovedsakelig fagbioingeniør.

UTFØRELSE

En detaljert beskrivelse av fremgangsmåtene for oppsett og endring er nærmere beskrevet i kapittel 8 – Opprette fargeprotokoller (s63-73) i Brukermanualen til BenchMark Ultra.

Før et nytt protokolloppsett skal det ved [nytt antistoff](#) utføres en endringsprotokoll som siden etterfølges av en verifiseringsrapport.

Ved oppsett eller endring går man inn via "Protocols" i hjemvinduet. Deretter velger man "create/edit-protocols". Velg deretter aktuell deteksjonsprosedyre. Ved endring velges aktuell protokoll som skal endres. Rediger protokoll ved å legge til eller fjerne valg. Lagre endringer ved gjeldende navn og protokollnr. Dette kan ikke endres pga kommunikasjon med LVMS.

[Antistofflista](#) oppdateres ved endringer.

Vedlegg:

Kryssreferanser:

[II.MSK.Pat.2.3.3.1-4 Verifisering/optimalisering av antistoff. Immunologi. Histologisk enhet. Avd. for patologi SSK](#)

[II.MSK.Pat.2.3.3.2-1 Antistoff - oversikt. Immunologi. Histologisk enhet. Avd. for patologi SSK \(ARKIVERT\)](#)

[II.MSK.Pat.2.3.3.1-4 Verifisering/optimalisering av antistoff. Immunologi. Histologisk enhet. Avd. for patologi SSK](#)

Eksterne referanser:

DokumentID:D35709

Utarbeidet av: Fagbioingeniør Margrete Bodin Erdal	Fagansvarlig: Margrete Bodin Erdal	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 07.06.2022 - Linda Kvelland Skaara
--	--	--	---

Dokumentplassering:
II.MSK.Pat.2.3.3.1-12Utarbeidet av:
Fagbioingeniør Margrete
Bodin ErdalFagansvarlig:
Margrete Bodin ErdalGodkjent
dato:
11.04.2024Godkjent av:
Avdelingssjef Hilde
Bjørnestøl HansenRevisjon:
2.01