

 SØRLANDET SYKEHUS		Somatikk Kristiansand		Prosedyre
Nødstopp/Strømstans CT SFK				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOK.SFK.2.5.1.2.2.1-3		Godkjent dato: 16.09.2024	Gyldig til: 16.09.2026	Revisjon: 4.01

Somatikk Kristiansand/Senter for kreftbehandling/Pasienter og brukere/Stråleterapi/Generelle prosedyrer

1. Endringer siden forrige versjon

2. Hensikt / Omfang


Personalet må gjøre seg kjent med nødprosedyrer før bruk av CT. Denne prosedyren gir en oversikt over nødstopppknapper i kontrollrom og undersøkelsesrom. Prosedyren beskriver også hvordan man får en pasient ned av CT-bordet i tilfelle nødstans / strømstans.

3. Fremgangsmåte

3.1 Nødstopp

I tilfelle brann, uvedkommende tiltreder behandlingsrom under CT-opptak eller hvis strålingen av noen grunn ikke stopper, så skal nødstopp brukes.

Nødstopppknapper finns fordelt på flere steder i CT-rommet, se Figur 1 for oversikt. Figur 2 viser hvordan de ulike nødstopppknappene ser ut, felles for alle knappene er at de er røde.

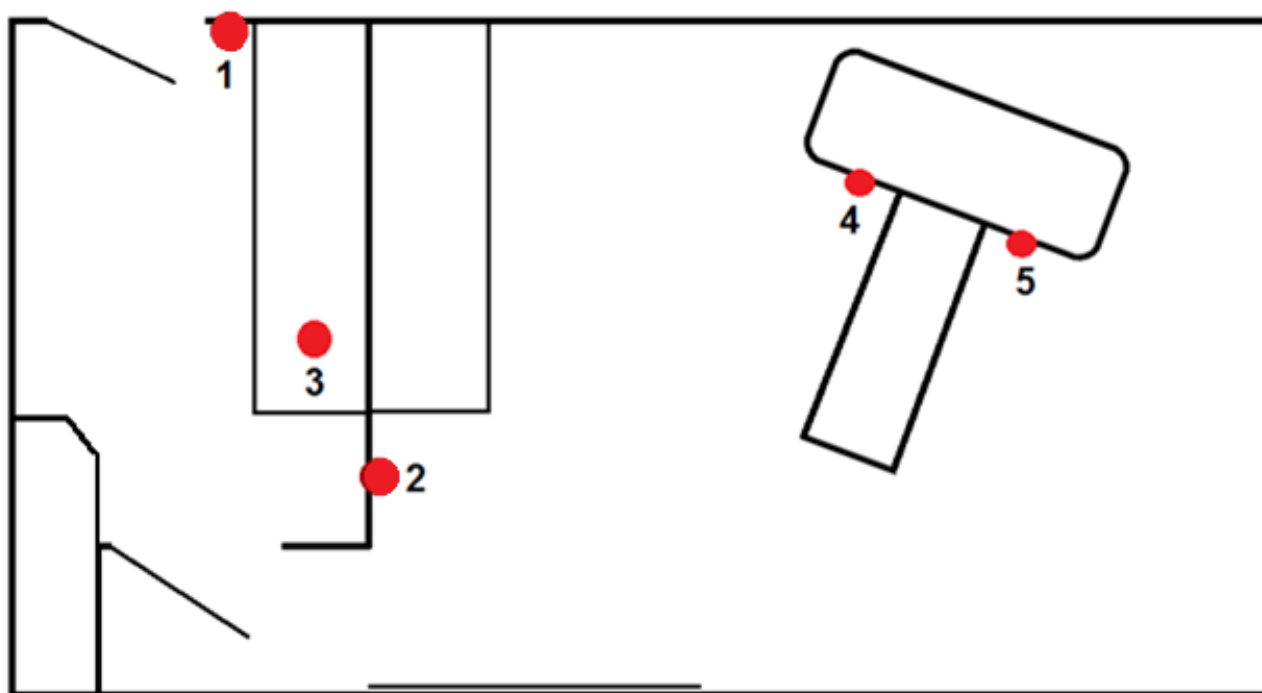


Figur 1: Røde prikker merker ut lokalisasjonene for nødstopppknapper i kontrollrom og undersøkelsesrom

Utarbeidet av: Senter for kreftbehandling/wli	Fagansvarlig: Mathis Paul Hasler	Godkjent av: Birthe Rokne Stensland	
---	--	---	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Nødstopp/Strømstans CT SFK				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.SFK.2.5.1.2.2.1-3	Utarbeidet av: Senter for kreftbehandling/wli	Fagansvarlig: Mathis Paul Hasler	Godkjent dato: 16.09.2024	Godkjent av: Birthe Rokne Stensland	Revisjon: 4.01

Somatikk Kristiansand/Senter for kreftbehandling/Pasienter og brukere/Stråleterapi/Generelle prosedyrer

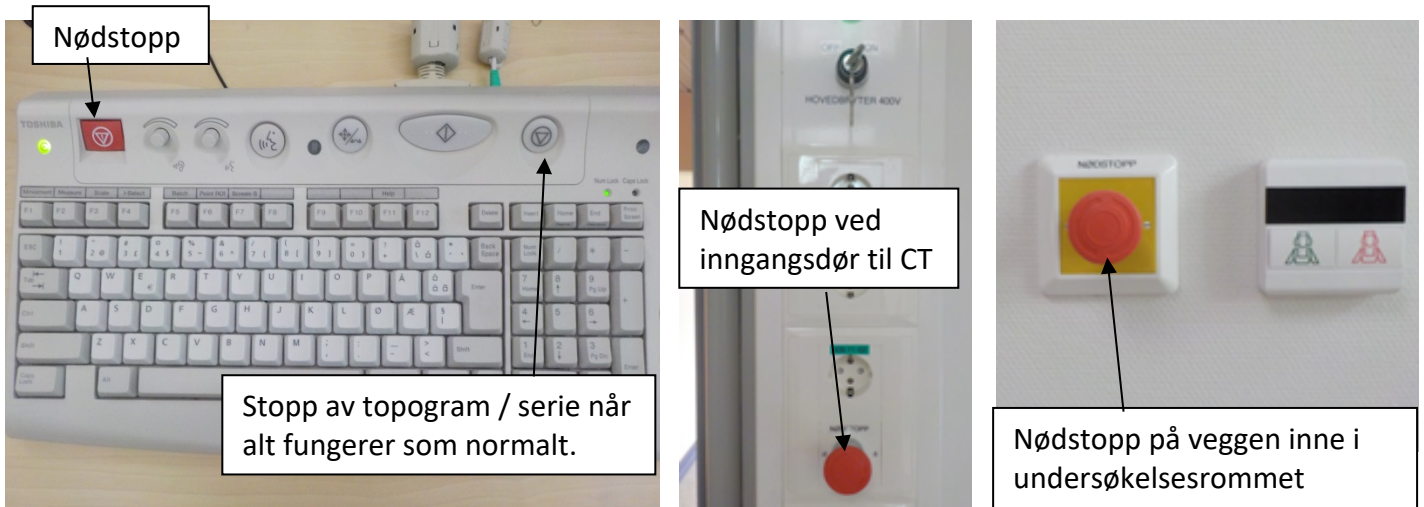

Figur 2: Eksempel på hvordan nødstopppknappene ser ut. Nødstopppknappene er plassert på tastatur, på veggen i kontrollrommet og undersøkelsesrommet.

3.2 Flytte bordet uten strømforsyning

I tilfelle strømstans/nødstopp og pasient ligger inne i CTgantry må benken dras ut manuelt. For å muliggjøre for dette må man først låse opp bordet. Noter at det kun er mulig å bevege benken i longitudinal retning og ikke i vertikal retning.

Låse opp benken:

- Åpne luken i enden av CT bordet (Figur 3)
- Trekk hendelen (Figur 4) mot venstre
- Dra CT-bordet ut av gantry.
- Hvis pasienten er immobil brukes seng for å få av pasienten fra bordet;
 - Seng kan hentes fra innhukket ved strålesykepleierens kontor
 - Sengen heises opp for å bli like høy som CT-bordet
 - Pasienten dras over i sengen
- Etter at dette er utført: Vri hendelen tilbake, slik at den igjen peker mot høyre (Figur 4)



Figur 3: Luke i enden av CT bordet



Figur 4: Hendel står her i normal stilling mot høyre. Hendelen trekkes mot venstre for å låse opp bordet i longitudinal retning

Kryssreferanser