

Uttak av portio. Leger. Avd. for patologi SSK

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.Pat.2.6.1-5

Godkjent dato:

15.02.2023

Gyldig til:

15.02.2025

Dato endret:

15.02.2023

Revisjon:

4.01

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Legeprosedyrer/Makro

DISTRIBUSJONSLISTE: EK. Tarifolder Makro

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 15.02.2025 uten endringer i dokumentet.

HENSIKT

Beskrivelse makrouttak av portio.

OMFANG

Leger og spesialbioingeniører

UTFØRELSE

Konisering:

Beskriv om preparatet er ringformet, oppklippet, orientert eller i flere biter.

Alt materiale veies og måles. Hele, orienterte og oppklippet conus tas det tredimensjonale mål av. Hvis det er flere biter tas det mål av minste og største.

Reseksjonsflaten tusjes. Preparatet deles vinkelrett på slimhinne, om mulig få med komplett lengdesnitt.

Orienterte preparater deles fra merkingen og med klokken.

Ringformede preparater deles som vist på tegning.

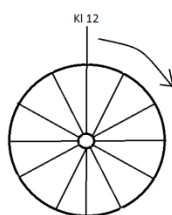
Oppklippede preparater deles fra kant til kant.

Alt materiale innstøpes, maks to pr. blokk.

Amputat:

Se PHIST, ved funn av dysplasi, kontakt lege.

Ingen dysplasi: Mål i tre dimensjoner og vekt. Reseksjonsflaten tusjes. Ta tverrsnitt av reseksjonsflaten og ett lengdesnitt av portio, helst fra fremre mormunn/kl. 12.

**Vedlegg:****Kryssreferanser:****Eksterne referanser:**

Dokumentet skal verifiseres av medisinsk ansvarlig overlege.

DokumentID: D37560

Utarbeidet av: Spesialbioingeniører Stine Wathne og Laila Moseid	Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Grete Lill Holt	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 14.05.2020 - Linda Kvelland Skaara, 14.05.2020 - Avdelingsoverlege Rolf Bruun Bie
--	--	--	--