

Telemetri Bruksanvisning, SSK

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-22

Godkjent dato:

22.11.2024

Gyldig til:

15.11.2024

Revisjon:


6.00

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig

Kort bruksanvisning MX40 Telemetri

- Sett i batteriet
- Telemetri/MX 40 alarmerer inntil den har opprettet kontakt med sentralen
- Skjermen blir svart etter 1 min. Hold inne "blå tast" i minst 2 sek. for å aktivere skjermen.
- Ved å trykke flere ganger på den "blå tasten" kan du veksle mellom fem ulike skjermbilder som viser: riktig elektrodeplassing, hvilke elektroder som evt er løse, EKG/hjertefrekvens evt puls/SpO2.
- Taster/skjerm låses etter 5 min. Trykk på "blå tast" for å aktivere skjermen, trykk deretter på den "grå tast med hvite prikker" slik at skjermbildet som heter "smarttaster" kommer opp. Trykk så på "pil ned" (til høyre i selve skjermbildet) for å komme til neste side. Trykk på den røde hengelåsen for å åpne denne. Taster/skjerm er nå aktive.
- Batterisymbolet nederst til høyre i skjermbildet viser gjenværende batteritid. Det skifter farge fra grønt til rødt når nærmer seg utladet.

Hexad elektrodeplassing for MX40 Telemetri

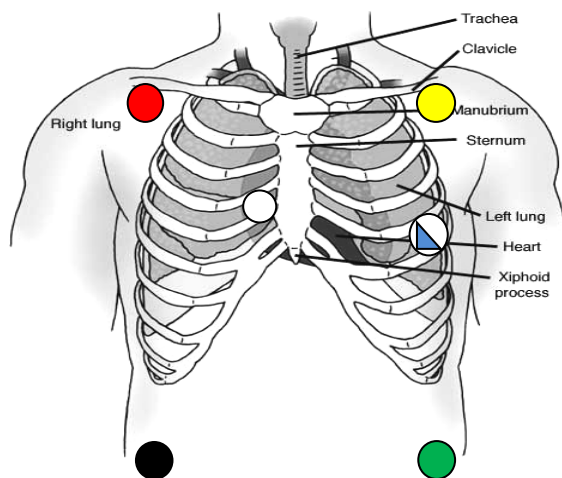

Elektrode med farge plasseres som standardavledninger i 12-avl.-EKG:

- Rød elektrode (R) rett under høyre klavikula ved skulder evt på høyre skulder
- Gul elektrode (L) rett under venstre klavikula ved skulder evt på venstre skulder
- Grønn elektrode (F) på nedre venstre side av abdomen
- Svart elektrode (N) på nedre høyre side av abdomen

Elektrode 5 og 6 plasseres som V1 og V5 i 12-avl.-EKG

- Hvit elektrode (Ca) plasseres i fjerde intercostalrom til høyre på brystet inntil høyre kant av sternum, dvs som V1 i 12-avl.-EKG.
- Hvit elektrode m/blått tegn (Cb) plasseres på venstre side av brystet i aksillærlinjen i 5 intercostalrom, dvs som V5 i 12-avl.-EKG, Obs: På skjermen til MX40 er denne elektroden markert som hvit ring med rød prikk i midten. Elektroden er og på skjermbildet plassert litt mer mot midten av thorax ifht hvor den skal.

IntelliVue MX40

Main screen



Main screen


- Touch for 2 seconds to **activate** screen
- Touch again to **change** the screen

*With PIIC Revision N/N.01/PIIC iX



IntelliVue MX40

Smart Keys

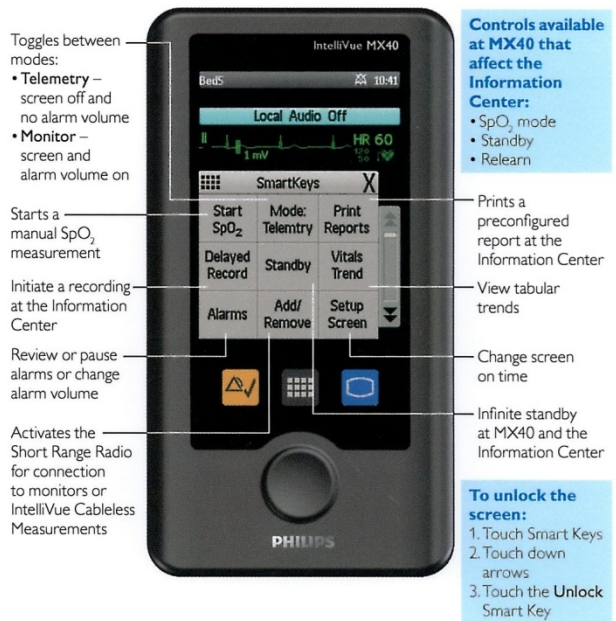

Controls available at MX40 that affect the Information Center:

- SpO₂ mode
- Standby
- Relearn

To unlock the screen:

1. Touch Smart Keys
2. Touch down arrows
3. Touch the Unlock Smart Key

© 2013 Koninklijke Philips N.V. All rights are reserved.

Printed in the U.S.A. 4535 644 42861 * AUG 2013



Kryssreferanser

Eksterne referanser

IntelliVue MX40 versjon B.0 Philips Medical System