

 Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service		Generelt dokument		
Shimadzu - sletting av pasienter ved full disk - Rad.avd.SSA		Side 1 av 2		
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.12-4	Godkjent dato: 24.06.2026	Gyldig til: 24.06.2028	Dato endret: 24.06.2026	Revisjon: 2.08

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring


DISTRIBUSJONSliste: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret mal

PAST 1

Blinker gult/rødt

- Gå inn på PAST
- Select All Studies
- Trykk Søppelkasse
- Trykk Delete
- Warning: OK to delete the Study - OK

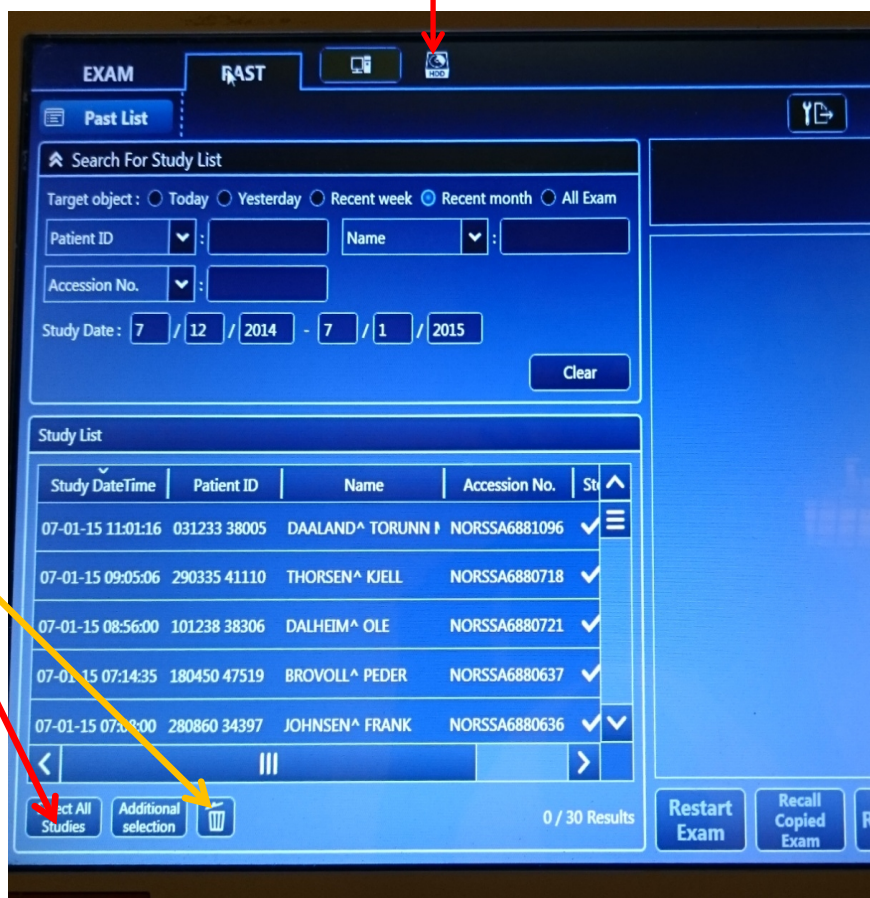

DokumentID:D38026

Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: 	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Verifisert av: 
---	--	---	---


 SØRLANDET SYKEHUS	Shimadzu - sletting av pasienter ved full disk - Rad.avd.SSA				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.12-4	Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 24.06.2026	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 2.08

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

PAST 2

Blinker **gult/rødt**

- Gå inn på PAST
- Velg Additional selection
- Skriv inn Study Date eller velg Recent month/week
- Trykk på søppelkasse
- Trykk så Delete
- Warning: OK to delete the Study - ...

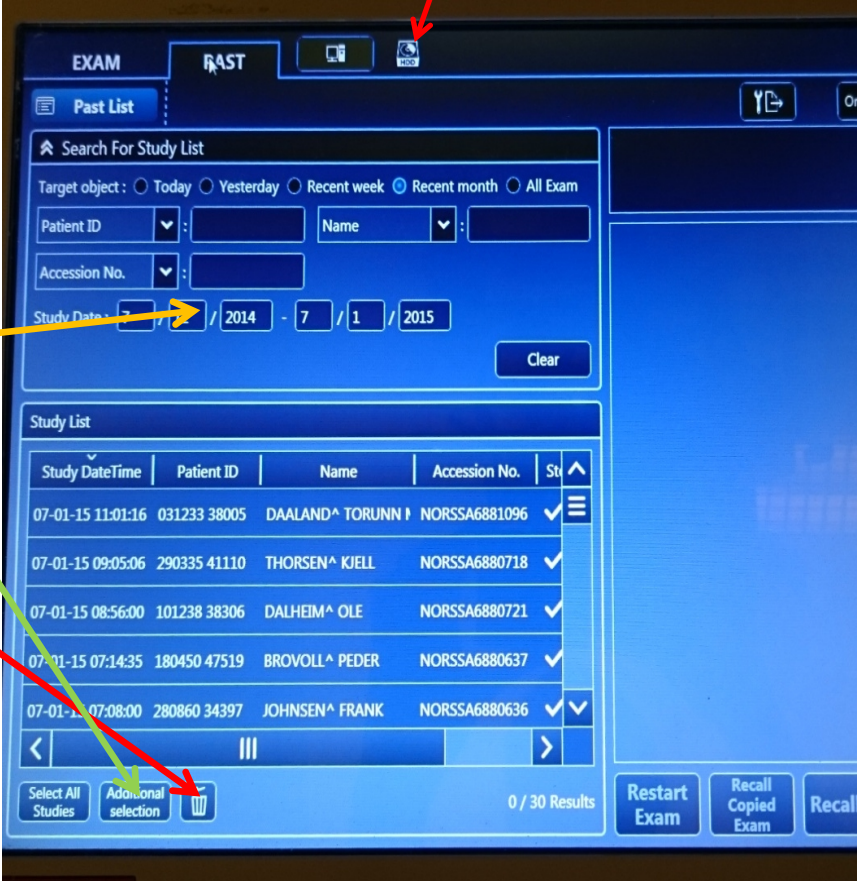

The screenshot shows the 'PAST 2' interface with the 'Past List' tab selected. The search criteria are set to 'Recent month'. The results table lists several studies with columns for Study Date/Time, Patient ID, Name, Accession No., and a status column. At the bottom, there are buttons for 'Select All Studies', 'Additional selection', and a trash icon (søppelkasse). A red arrow points to a status icon in the top right, a green arrow points to the 'Additional selection' button, and a red arrow points to the trash icon.

Study Date/Time	Patient ID	Name	Accession No.	St
07-01-15 11:01:16	031233 38005	DAALAND^ TORUNN I	NORSSA6881096	✓
07-01-15 09:05:06	290335 41110	THORSEN^ KJELL	NORSSA6880718	✓
07-01-15 08:56:00	101238 38306	DALHEIM^ OLE	NORSSA6880721	✓
07-01-15 07:14:35	180450 47519	BROVOLL^ PEDER	NORSSA6880637	✓
07-01-15 07:08:00	280860 34397	JOHNSEN^ FRANK	NORSSA6880636	✓