

 Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service		Generelt dokument	
A6 - Arbeidsstasjonen		Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.10-5	Godkjent dato: 25.11.2025	Gyldig til: 25.11.2027	Dato endret: 25.11.2025
			Revisjon: 2.03

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, 2 godkjente papirversjoner finnes på lab A6

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 25.11.2027

ARBEIDSSTASJONEN:

SKRU PÅ: på datamaskinen

- Login: sdc
- Password: adw4.4

NB!!

Det er ingen stjerner/ prikker som markerer at passordet er skrevet inn. Feltet blir stående blankt. Men så lenge passordet er skrevet inn korrekt, blir man innlogget etter å ha trykket enter.

SKRU AV:

System	▼
--------	---



Shutdown



Yes

OVERFØRE BILDER TIL PACS:

- Marker den undersøkelsen og serien som skal overføres
- Klikk på ikonet som ser ut som en liten datamaskin på linjen "Series" (omtrent midt på skjermen)
- Det kommer opp et skjermbilde; "Push selected serie(s)"
- Velg PACS Store
- Trykk Push
- Bildene er nå over i PACS

DokumentID:D40605

Utarbeidet av: Darlene Sandvik	Fagansvarlig: Darlene Sandvik	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Verifisert av: □
--	---	---	----------------------------

 SØRLANDET SYKEHUS	A6 - Arbeidsstasjonen				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.10-5	Utarbeidet av: Darlene Sandvik	Fagansvarlig: Darlene Sandvik	Godkjent dato: 25.11.2025	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 2.03

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

HENTE BILDER FRA PACS:

- Klikk på **Search New** nederst på den venstre skjermen. Det vil da komme opp et søkefelt på den høyre skjermen. Skriv inn for eksempel pasientnavn og fødselsdato.
- Klikk deretter på ikonet **Search** oppe til høyre på den høyre skjermen.
- Marker aktuell undersøkelse.
- Klikk på det lille ikonet som viser en datamaskin på linjen examinations.
- Det kommer opp et skjermbilde med spørsmålet "Get selected exam(s)?"
- Klikk YES
- Etter noen sekunder vil statusfeltet nede til venstre på den venstre skjermen begynne å blinke grønt. Når det har sluttet å blinke (dette kan ta noe tid, avhengig av hva slags undersøkelse som skal hentes frem) er bildene ferdig lastet.
- Pasienten kan da letes opp i examinations på den venstre skjermen.
- Dobbelklikk på pasienten, undersøkelsen eller et av bildene på høyre siden av venstre skjerm.
- Velg ønsket bilde/ serie.
- Det skjermbildet som vises på den venstre skjermen på arbeidsstasjonen er det samme skjermbildet som vises på slaveskjermen (skjermen lengst til høyre i undersøkelsesrommet)