


 Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service		Prosedyre		
Rengjøring CT Exprès Rad.avd. SSA				Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.2.1.11-3	Godkjent dato: 04.12.2025	Gyldig til: 04.12.2027	Dato endret: 04.12.2025	Revisjon: 1.06

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Pasientbehandling/CT/CT Diverse

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 04.12.2027

- Slå alltid AV strømmen på baksiden av hovedenheten før systemet rengjøres
- Under normal bruk tørkes saltvanns- eller kontrastmiddelsøl opp med en fuktig klut og varmt vann. Bruk kun alkoholbaserte antibakterielle løsninger og en klut for å desinfisere CT Exprès™ 3D
- Hvis det er kontrastmiddel- eller saltvannssøl på flaskeholderne, kontrollerer du og rengjør punkter som illustrert under
- Rengjør sporene for dagsett (inkludert den lille plattformen), samt sensorene, med egnet klut eller fuktig bomullspinne. Kontrast her kan gi falske varsel om luft i systemet
- Rengjøring skal skje ved behov, samt hver morgen av nattevaktene (sjekkliste)

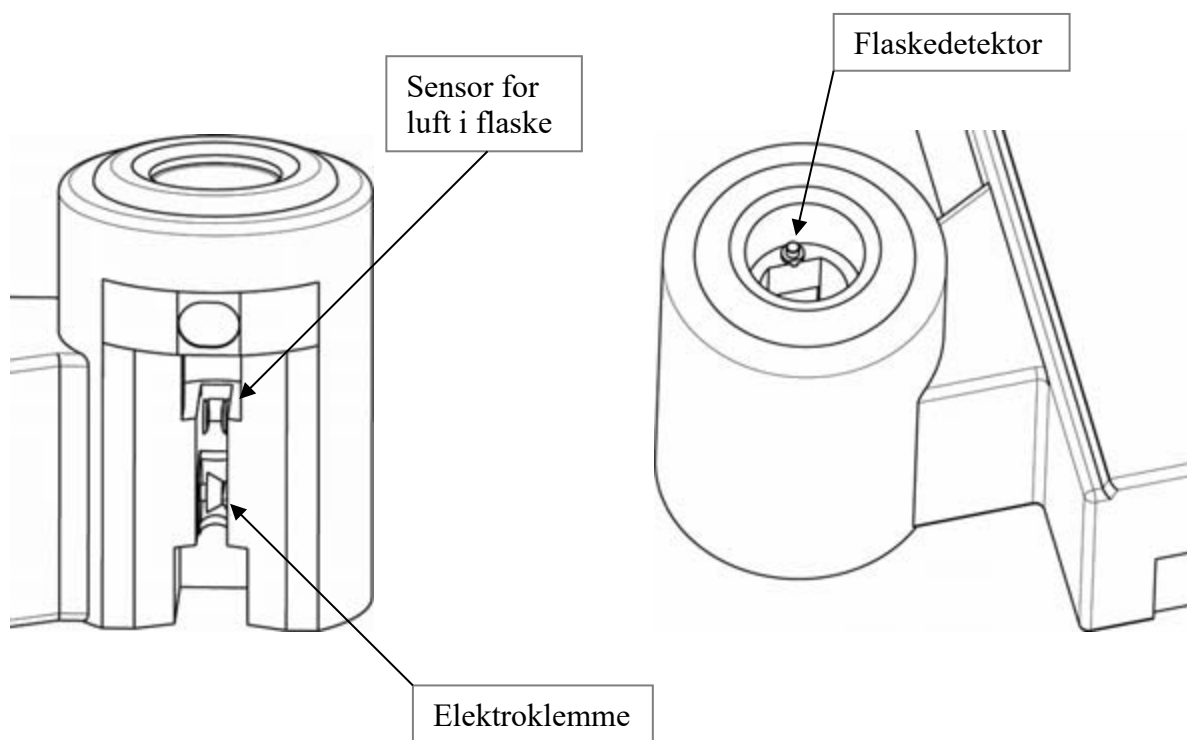

DokumentID:D41006

Utarbeidet av: Unni Omholt Volden	Fagansvarlig: Unni Omholt Volden	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Verifisert av: □
---	--	---	----------------------------