

RRengjøring og desinfeksjon av undersøkelsesrom, utstyr og inventar, gastrolab, Med avd. SSK

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-36

Godkjent dato:

17.10.2023

Revideres innen:

17.10.2025

Sist endret:

17.10.2023

Revisjon:

4.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Sikre at undersøkelsesrom med inventar og utstyr rengjøres/desinfiseres etter helseforetakets retningslinjer.

MÅLGRUPPE

Sykepleier/hjelpepleier/teknikker på gastrolab.

FREMGANGSMÅTE

Rengjøring og desinfisering etter helseforetakets retningslinjer.

BRUK RENGJØRINGSKLUTENE: Wipe Clean, Peracetic Acid Wipes, Antibac våtservietter eller 70%sprit.

VED KJENT SMITTE bruk: VirKon eller Perasafe

Område	Frekvens	Middel
Rengjøring/desinfisering av arbeids/oppdekkingsbord <ul style="list-style-type: none"> Alt brukt utstyr og papirduk fjernes. Er bordet tørt, behøver man ikke vaske. Dersom gjennomtrukket duk – desinfiser. 	Mellom hver pasient	Wipe Clean
Endoskopiracket rengjøres etter bruk <ul style="list-style-type: none"> Desinfiser alle berøringspunkter Ledninger når diatermien er brukt Desinfiser ved synlig forurensing Plasttrekk på pedaler skiftes, skriv dato Skiftkladd på toppen, skriv dato. 	Mellom hver pasient Mellom hver pasient Ved behov Ved behov, ellers hver fredag Hver fredag	Antibac 70% Peracetic acid wipes Peracetic acid wipes Wipe Clean
Vegg bak oppdekkingsbord, utvendig sugekolbe, O2 manometer, skapdører/håndtak <ul style="list-style-type: none"> Rengjøres ved synlig søl/sprut 	Ved behov og på slutten av dagen	Wipe Clean
Undersøkelsesbenk <ul style="list-style-type: none"> Skifte papirdekke Skifte tøylaken/putetrekk Rengjør benk og gulv rundt ved søl/sprut Eventuelt punktdesinfisering 	Mellom hver pasient Ved behov og på slutten av dagen Ved behov Ved behov	Antibac 75%
Sao2 måler <ul style="list-style-type: none"> Desinfiser fingerklype og ledning 	Mellom hver pasient	Peracetic acid wipes
Utralydprobe	Mellom hver pasient	Wipe Clean
Dostol <ul style="list-style-type: none"> Potta vaskes setet og håndtak vaskes 	Mellom hver pasient Mellom hver pasient	Spyledekontaminatoren Peracetic acid wipes
Toalettrommet		Vurdere egnet

 Utarbeidet av:
Katrine Vårlid Foss

 Fagansvarlig:
Katrine Vårlid Foss

 Verifisert av:
 □

 Godkjent av:
Janicke Lindebø Aamot

 Dok.nr:
D42689

