

Rengjøring/desinfisering av skop og hjelpeinstrumenter, nasjonale anbefalinger. Med. avd. ssk gastrolab

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-41

Godkjent dato:

17.01.2024

Revideres innen:

17.01.2026

Sist endret:

17.01.2024

Revisjon:

4.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Vask/desinfisering av endoskop og hjelpeinstrumenter som vannflaske, hule slanger og sonder.

Legg frem ved dagens begynnelse:

- Liten gjennomspylingslange - Maj-974
- 20ml sprøyte,
- liten børste - Maj 507,
- eventuelt lite spesialbørste til ercp-skop,
- målebeger til såpe.
- Børste til kanalene, Push&Pull brush med piperens
- Kurv til ventiler
- Vasken fylles med vann (ca. 35 o/c) opp til det blå merket, 35 l.

Såpe: 3E-Zyme. Er kompatibel med såpen/desinfeksjonsmiddel i Olympus ED3 og ED4 skopvaskemaskin. Etter anbefalinger rådes det til å skylle skopene utvendig og spyle igjennom kanalene med rent vann etter den manuelle vasken, helst i egen vaskekum. Pr.dags dato er dette praktisk vanskelig å gjennomføre pga. utformingen på skyllerommet.

Dosering av såpen: 5ml 3E-Zyme /L vann. Dette utgjør:

- 2 ml 3E-Zyme til 4dl vann
- 1,75 dl 3E-Zyme til 35 l vann. Bruk målebeger.

Manuell vask av endoskopet:

- Skopet tørkes umiddelbart av utvendig med skumklut og En-Zymesåpe. Bytt til vaskeventilen og sug 4dl ferdig utblandet såpe gjennom skopet. Dette foregår på undersøkelsesrommet rett etter avsluttet undersøkelse.
- Manuell testing og resten av rengjøringen foregår nedsenket i vann på skyllerommet. Skopet vaskes godt utvendig med skumkluten, husk tuppen! Skyll gjennom ekstra spylekanal. Børst gjennom alle kanaler.
- Bruk liten børste, Maj 507 i alle ventilåpninger. ERCP skop børstes ekstra men liten spesialbørste.
- Dersom vasken er opptatt legges skopet i en bakke sammen med børste, skumgummiklut og ventiler.
- Ved kjent smitte og opptatt vask: Skopet embaleres som over og merkes smitte.
- Ved ferdig testet og vasket skop og opptatt ED3 maskin, legges skopet i en bakke uten børste og klut.
- Kummen skylles med rent vann mellom hvert skop. (Også kantene)

Utarbeidet av: Katrine Vårlid Foss	Fagansvarlig: Janicke Lindebø Aamot	Verifisert av: □	Godkjent av: Janicke Lindebø Aamot	Dok.nr: D43441
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------------------------	-------------------

 SØRLANDET SYKEHU		Rengjøring/desinfisering av skop og hjelpeinstrumenter, nasjonale anbefalinger. Med. avd. ssk gastrolab			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-41	Utarbeidet av: Katrine Vårlid Foss	Fagansvarlig: Janicke Lindebø Aamot	Godkjent dato: 17.01.2024	Godkjent av: Janicke Lindebø Aamot	Revisjon: 4.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere

Oppbevaring av skop etter vask:

- Vurder hvor mange skop det er bruk for.
- Skopet henges i tørkeskapet eller legges i ren bakke. Må vaskes på nytt etter tre timer dersom det ikke blir brukt.

Kjemisk desinfisering:

Brukes til utstyr som ikke tåler varmedesinfisering, eller av praktiske årsaker vanskeligjør vasking i instrumentvaskemaskin.

- Perasafe: Utstyret må være rengjort før påføring av desinfeksjonsmiddel, la virke i 10 minutter.
- Virkon: Ved rengjort utstyr, la ligge i 10 minutter, ved synlig forurenset og ikke rengjort utstyr, la ligge i 30 minutter.

Vannflasken:

- Byttes etter formiddagsøkten og før kveldspoliklinikken. (Ca.hver 3. time). Vaskes stående i spyledekontaminatoren sammen med slangen. Slangen tørkes med trykkluft før flaske og slange henges bort etter bruk.

Olympus og Endotec vannbeholdere

- Vaskes stående i spyledekontaminatoren på slutten av dagen.

Vask av Maj-855 og Maj-974 (lang og kort spyleslanger): 3 alternative vaskemetoder:

- Tømmes for vann med 20ml sprøyte. Sett sprit igjennom. La virke et min. Tømmes for sprit med 20ml sprøyte, vaskes i dekontaminatoren. Tørkes innvendig med trykkluft etterpå.
- Virkon/Perasafe. Ha desinfeksjonsmiddel gjennom slangen og i et kar der utstyret senkes ned i. Etterpå samme prosedyre som over.
- Vaskes i skop-maskinen. Bruk samme kobling som til EUS skopene. Legg endene av slangene opp i en ventilkurv. Tørkes innvendig med trykkluft etterpå.

Vask av benk og vask på skyllerommet:

- Vasken skylles med rent vann mellom hvert skop.
- På slutten av dagen vaskes alle overflater med Virkon
- Etter smitteskop vaskes benk, vask og kraner med egnet desinfeksjonsmiddel. Bakken som skopet har ligget i vaskes på samme måten og legges i vasken.

Kryssreferanser

[I.6.2.6.2.1.6-1](#)

[Desinfeksjon av instrumenter, utstyr - generell retningslinje](#)

Eksterne referanser

<https://www.nsf.no/fg/gastrosykepleiere/fagprosedyrer>