

		Somatikk Arendal		Prosedyre
Icare				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOA.ØYE.2.8.2-5		Godkjent dato: 12.06.2023	Gyldig til: 12.06.2025	Revisjon: 3.00

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Poliklinikk

Formål

Måling av øyetrykk

Utstyr

- Icare
- Probe

Før undersøkelsen

- Informere pasienten om hva som skal skje

Fremgangsmåte

- Skru på Icare
- Sett inn probe
- Be pasienten se rett frem, evt. se på et objekt
- Gjennomfør målingen
- Det blir regnet ut et gjennomsnittstrykk som kan leses av på displayet

Observasjoner

Viktig at proben treffer omtrent samme sted, sentralt på cornea, helst i 90 grader mot cornea.

Utarbeidet av: Ann Karin Bjurstrøm	Fagansvarlig: Espen Ringvold	Godkjent av: Espen Ringvold	
--	--	---------------------------------------	--

Dokument-id: II.SOA.ØYE.2.8.2-5	Utarbeidet av: Ann Karin Bjurstrøm	Fagansvarlig: Espen Ringvold	Godkjent dato: 12.06.2023	Godkjent av: Espen Ringvold	Revisjon: 3.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Poliklinikk