

SJEKKLISTE AKUTTROM

EKG APPARAT

- Sjekk beholdning av klistrelapper
- Åpne luke på toppen og sjekk at det er nok ark
- Barberhøvler
- Sjøppelpose
- Apparatet skal stå til lading når det ikke er i bruk

BLÆRESCANNER

- Sjekk beholdning av gel, spritlapper og papir
- Apparatet må kalibreres 1x uke (Ansvar team 1A)

SUG

- Sjekk at apparatet er riktig satt sammen
- Test trykket ved å stenge for sugeslangen med en finger
- Sjekk beholdning av kateter og holdbarhet
- Sjekk beholdning av filter, engangsslanger og mellomstykker
- Apparatet skal stå til lading når det ikke er i bruk

O2 KOLBE 20 LITER (STOR)

- Skru på apparatet og kontroller mengden. Apparatet skal leveres til vaktmester dersom pilen peker på rødt område når apparatet er skrudd på
- Sjekk beholdningen og holdbarhet på O2 slanger, brille- og nese kateter

O2 KOLBE 2,5 LITER (LITEN)

- Skru på apparatet og kontroller mengden. Apparatet skal leveres til vaktmester dersom pilen peker på rødt område når apparatet er skrudd på. Det skal henge en ekstra 2,5 liters O2 kolbe på akuttrommet. Denne må settes klar til bruk dersom en kolbe leveres til vaktmester.
- Sjekk at oksygenmaske er tilkoblet kolben, klar til bruk. (Dersom det ikke finnes en oksygenmaske som kan være koblet til, skal et brillekateter kobles til)

AKUTTKOFFERT (GRØNN)

- Egen sjekkliste: Sjekk innhold og holdbarhet

SUTURKOFFERT (BLÅ)

- Egen sjekkliste: Sjekk innhold og holdbarhet

HJERTESTARTER

- Dersom apparatet gir fra seg en sterk lyd, må batteriet skiftes
- En innblåsningsmaske skal ligge sammen med hjertestarteren
- Sjekk at den inneholder barberhøvel, håndkle og saks

PULSOKSYMETER

- Sett på apparatet og sjekk at batteriene virker
- Kontroller at det ligger ekstra batterier i den hvite boksen

FORSTØVER

- Sjekk at den står klar til bruk og er riktig satt sammen

VENTILASJONSBAG

- Skal stå på akuttrom

HJERTEBRETT

- Skal stå på akuttrom

Akuttrommet skal sjekkes hver måned. Egen sjekkliste. Oppgavene føres inn i svarteboka på hvert team av ass. enhetsleder for hvert halvår.

Medisinsk teknisk avdeling har ansvaret for tilsyn/kalibrering av utstyret og gir beskjed når utstyret skal leveres inn for sjekk.